

PMDA 医療安全情報

(独)医薬品医療機器総合機構


pmda No.28 2011年 11月

血糖測定器の取扱い上の注意について

POINT 安全使用のために注意するポイント

1 血糖値への影響について

- 果物をむいた後などに指先から血糖測定を行うと、偽高値となるおそれがあります。

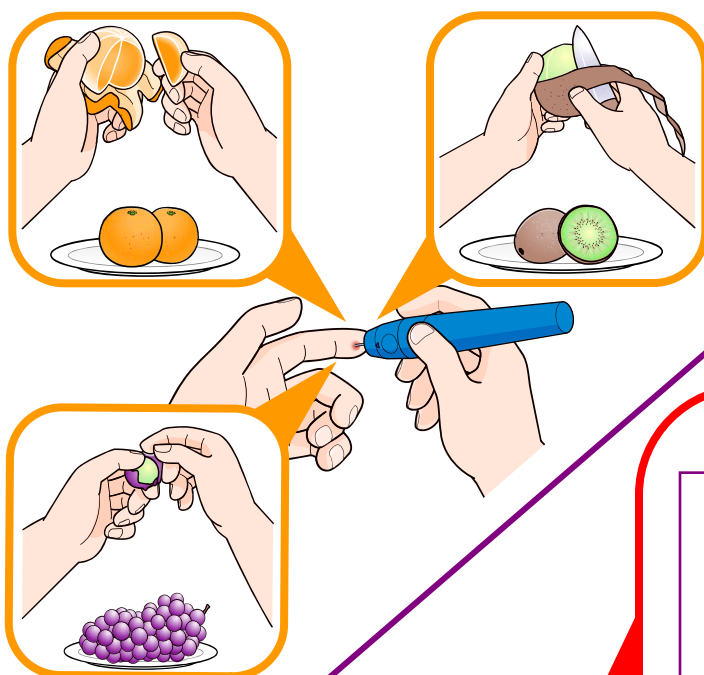

偽高値の表示例

ketones?
HI
mg/dL

血糖値
600 mg/dL より
高い
直ちに医師の指示
に従って下さい。

148
mg/dL

203
mg/dL

注) 血糖測定器の機種によって、表示は異なります。

果物をむいたり、砂糖が付着している食べ物等をさわった後は、**時間経過**に関係なく、その指先に付着した果汁や糖分が採血した血と混じり、測定結果が「HI」や「高い値」を表示するおそれがあります。



