



ARC カニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - (1) 再使用禁止
 - (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示に記載されているので確認すること。

製品名	製品外観	主な材質
ARC カニューラ		シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は、関節鏡視下手術の際にトンネルを作製、拡張又は拡大するために用いる。

【使用方法等】

本品は滅菌済みにつき、包装開封後、そのまま直ちに1回限り使用する。

＜使用方法＞

1. 皮膚を切開する。
2. カニューラのロッキングナットを近位端へ回す。
3. フォーセプスを用いて、カニューラ先端部のウイングを折りたたむ。
4. ウイングを挟んでいるフォーセプス側から、皮切口を通してカニューラを挿入し、設置する。
5. フォーセプスを開いてカニューラを放し、フォーセプスを外す。
6. ロッキングナットを患者の皮膚にねじ留める。



【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 使用前に本品に損傷が無いことを確認すること。
 - (2) カニューラの直径よりも大きいサイズのものは挿入しないこと。
 - (3) 本品に過剰な力を加えて使用しないこと。
 - (4) 滅菌パッケージを開封した製品は、再使用しないこと。

2. 不具合・有害事象

- (1) 重大な不具合
 - ・破れ、漏れ
- (2) 重大な有害事象
 - ・感染症
 - ・アレルギー、組織炎症／紅班

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

常温、常湿にて保管すること。

有効期間

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号:03-6402-6600(代)

主たる設計を行う製造業者: ConMed Corporation French Road Facility、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。