

ドライノーズ対策に
ご使用ください!!

【製造者・輸入者】



601 Aviation Blvd., Santa Rosa, CA
95403 USA Tel: (877) 477-8633
www.neilmed.com

ニールメッド株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-3

TEL.0120-41-3173

www.neilmed.jp

ISO 13485: 2016 International
Accreditation Quality Management
System Certified Company

MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



Please place
Current Japan UPC code

5 mm.
NeilMed®

サイナス ミスト®

生理食塩水スプレー

風邪
アレルギー
対策

鼻詰まり対策スプレー

保存料無配合

防腐剤など医薬成分無配合

「塩」の力で鼻腔内を洗浄・清潔に保つ

1歳から使用可能

薬が使えない妊婦・授乳期の方に

125ml

※生理食塩水 (0.9%)

【成分】

塩化ナトリウム (9mg/ml)、重炭酸ナトリウム (0.5-1.0mg/ml)、精製水

【用途】

○鼻腔に噴霧し、鼻腔内のゴミ・かさぶた・チリを取り除く
○鼻腔内の洗浄 ○鼻水吸引器使用前の鼻腔内潤滑 ○鼻づまり解消

【特徴】

○無臭 ○アルコール、メントール、医薬成分等無配合
○携帯可能なコンパクトサイズ
○1歳から使用可能、妊婦・授乳期の方も使用可能

【使用方法】

1. キャップを外します 2. 鼻の中にボトル先端を入れ、ボタン部を人差し指か親指で押しスプレーします 3. 流れ落ちた液はティッシュペーパー等で拭き取ってください 4. スプレー後は「軽く」鼻をかんてください
○必要に応じてくり返しご使用可能です
○過度の使用は鼻の粘膜を傷つける場合があります

【使用上の注意】

○乾燥状態が進行したかさぶた・出血・たれへの使用前には医師にご相談ください
○開封後は早めに使い切ってください
○耳鼻咽喉科等で治療中の方は使用前に医師にご相談ください
○症状が改善されない時、異常が発生した場合は医師又は薬剤師にご相談ください
○幼児に使用する場合は保護者の責任・指導監督のもとと使用してください
○先端を鼻の奥まで入れないでください
○必ず体を起こした姿勢で使用してください

【サイナスリンズ】

○通常の生理食塩水 (0.9%) のスプレーです
○鼻詰まりの原因となる組織の水分を抽出し、鼻詰まりを解消し易くします
○痛みがある場合、また痛みが治まらない場合は、すぐに医師に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

○直射日光や高温の場所を避け、涼しい所に保管してください
○幼児の手の届かない所に保管してください
○他の方と使い回しをしないでください
○使い終わった後はスプレー缶としてゴミ出ししてください
○本製品を使用後、「軽く」鼻をかんてください。
口をあけ息をすると優しくかめます

一防医療機器 器55番 医療用洗浄器 製造販売元 ニールメッド株式会社
一協名特：手動式生体用洗浄器 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-3
届出番号：13B3X1018800006 電話：0120-41-3173

5 mm.