


## 器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

## ナスピラドロップス

## 【形状、構造及び原理等】

## 1.形状、構造

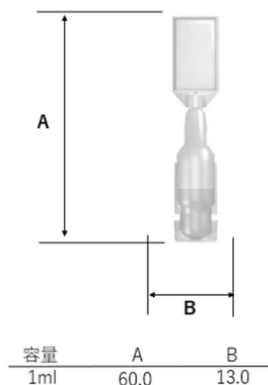

サイズ：単位[mm]

## 2.内容物

アンブル内に生理食塩水が 1ml 封入されている。  
（12 個入り）

## 3.各部の機能及び動作

No.	各部の名称	機能及び動作
1	アンブル	生理食塩水を内部に留め滴下する。

## 4.原理

本品は、アンブルに入れられた生理食塩水を鼻腔内に滴下することで、乾燥した、または粘り気のある鼻水を潤し、ふやかすことができる。

## 5.原材料

No.	各部の名称	原材料
1	アンブル	ポリエチレン
2	内用液	塩化ナトリウム、精製水

## 【使用目的又は効果】

生理食塩水を滴下し、鼻腔内の鼻詰まりのものを軟化させる。

## 【使用方法等】

## 使用前

- 1.アンブル先端をねじり、滴下口を開口する。
- 2.アンブルの先端を対象範囲に向ける。

## 使用中

- 3.アンブルを親指と人差し指で軽くつまむと、内用液が滴下される。
- 4.内用液を数滴垂らし、鼻腔内を潤す。

## 使用後

- 5.必要に応じて乳幼児用の鼻水吸引機で滴下した生理食

塩水と柔らかくなった異物を吸引する。

## 【使用上の注意】

- ・本製品を乳幼児に使用する前に必ず使用方法、使用上の注意を確認した上でご使用ください。
- ・生後 6 ヶ月以下の乳児にご使用される場合は、事前に医師にご相談ください。
- ・本製品を他の製品と混ぜないでください。
- ・アンブルの先を鼻の中に入れてください。滴下してご使用ください。
- ・アンブルが開いている場合、生理食塩水が濁っている場合は使用しないでください。
- ・アンブル開封後は保存できません。残ったものは破棄してください。
- ・本製品に関する使用方法、使用上の注意が記してある記載物は破棄せず大事に保管ください。
- ・アンブルは鼻に入れず 2～3 滴ほど滴下してください。必要に応じて追加で滴下してください。
- ・1 日 6 回までを上限に、必要に応じて使用してください。（使用頻度、使用量に関しては医師にご相談ください）

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、涼しい乾燥した場所で保管ください。
- ・お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・使用期限：4 年〔自己認証による〕

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ニールメッド株式会社  
電話番号：0120-41-3173  
外国製造業者：NeilMed Pharmaceuticals, Inc.  
国 名：アメリカ合衆国