

〔用途〕

傷、傷口の洗浄

〔使用方法〕

- ・スプレーする前に、製品に問題が無い事を確認した後を使用してください。
- ・傷口には、5cm～10cmほど離れたところからスプレーしてください。
- ・必ずノズル先端の凹み部（前部）に指をのせてスプレーしてください。
- ・初回使用時には、「カチッ」と音になるまで押してください。
- ・使用後はキャップをして清潔に保管してください。



ニールメッド

NeilMed®

neilMed®
cleanse

ウソド
ウソド
Wound Wash

保存料不使用・生理食塩水

消毒しない！

傷口洗浄スプレー！

逆さでのスプレー可能



177 ml



ロット番号・消費期限は
底面に記載

601 Aviation Blvd, Santa Rosa,
CA 95403 USA
Tel: 1 (877) 477-8633
www.neilmed.com

© NeilMed 2000-2017

〔成分〕

塩化ナトリウム(9 mg/ml)、精製水

〔使用上の注意〕

- ・火傷には使用しないでください。
- ・本製品は治療を目的としたものではありません。
- ・傷口洗浄以外の用途での使用は控えてください。
- ・継続的に傷口洗浄を行う場合は、専門医にご相談ください。(2歳以上の使用を推奨)
- ・空気がかかっているため、熱したり、鋭利なもので突いたりしないでください。
- ・こどもの手の届かない所で保管してください。
- ・直射日光や高温を避け、涼しい所で保管してください。5℃～55℃
- ・使用前に本製品に破損がある場合は、使用しないでください。
- ・使用後に皮膚に赤み、腫れ、または痛みがひどくなった場合は専門医にご相談ください。



STERILE
R

EC REP
MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

XXXX-JPN-INT_REV01_NB_2018320

