

BPS バイオプシーポートシール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

BPS バイオプシーポートシールには、次の構成品目がある。
BPS-A バイオプシーポートシール A

注) 本製品は再使用禁止である。

**2.各部の名称

BPS-A バイオプシーポートシール A

★は、使用中体腔内粘液に触れる部分である。

★ナット

材質：ポリカーボネート、
ポリテトラフルオロエチレン、
シリコンオイル

★シール


材質：シリコンゴム

★本体

材質：ポリカーボネート

★ルアーコネクタ

材質：ポリカーボネート

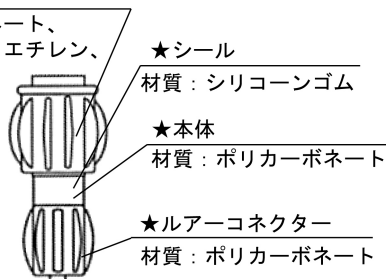

3.仕様

全長 : 30.5mm

作動・動作原理

構造

本体、ルアーコネクタ、ナット、および本体内部のシールからなる。

原理

内視鏡の鉗子挿入口に取り付け、ナットを回してシールを閉じることで体液などの逆流を防止する。処置具を使用する場合は、ナットを回してシールと処置具が密着することで、体液などの逆流を防止する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の内視鏡の鉗子挿入口に取り付け、処置具の挿入を可能にし、かつ体液などの逆流を防止することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.点検

以下の点検を行う。

(1)滅菌パックに異常がないこと。

(2)へこみ、亀裂、曲がり、スリキズなどの異常がないこと。

2.取り付け

本製品のルアーコネクタを内視鏡の鉗子挿入口に時計回りに回しながら装着する。ナットを時計回りの方向に回すことで、シールを確実に閉じることができることを確認する。

3.処置具などの挿入

ナットを反時計回りの方向いっぱい回してシールを開いてから、処置具などを目的の部位まで挿入する。目的の部位まで挿入した後、シールが処置具などと密着し、かつ処置具の動作を妨げることがない程度まで、ナットを時計回りに回して閉める。

4.廃棄

使用終了後はルアーコネクタを反時計回りに回して取りはずし、適切な方法で廃棄する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

組み合わせ機器	商品記号	販売名	医療機器届出番号
T 字管	MAJ-2092	T 字管 (口金分岐型) MAJ-2092	13B1X002 77000534

使用方法等に関連する使用上の注意

液体が漏れるおそれがあるため、処置具を目的の部位まで挿入した際は、ナットを回してシールを処置具としっかり密着させること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

本製品を用いた処置、取り扱い、術野が確保された状態で慎重に行うこと。

不具合

その他の不具合

破損、部品の脱落、変形

有害事象

その他の有害事象

感染、組織の損傷

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること（自己認証（当社データ）による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

*外国製造元：

メリット メディカル システムズ社
Merit Medical Systems, Inc.
国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。