

液体 LG ケーブル A93200A


【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

液体 LG ケーブル A93200A は次の構成品目がある。
・液体 LG ケーブル A93200A

2.各部の名称

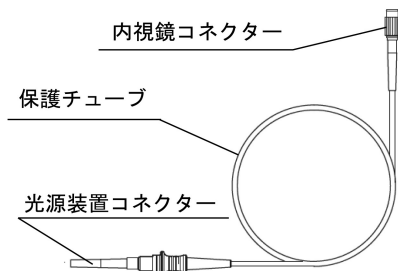

作動・動作原理

光源装置コネクタを光源装置に接続し、内視鏡コネクタを内視鏡に接続することにより、光源装置からの照明光を内視鏡に伝達する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、光源装置と内視鏡に接続して光源装置からの照明光を内視鏡に伝達することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.洗浄、消毒、滅菌

本製品の『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒および滅菌を行う。

2.接続

光源装置コネクタを光源装置に接続し、その後アダプタを介して内視鏡コネクタを内視鏡に接続する。

3.洗浄、消毒、滅菌

取りはずした後は、「1.洗浄、消毒、滅菌」と同様の方法で洗浄・消毒および滅菌を行う。

使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品と組み合わせて使用する代表的な内視鏡、アダプタ、光源装置は以下の通り。

組 み 合 わ せ 機 器	商品記号	販売名	医療機器認証番号または届出番号
内視鏡	WA2T400A WA2T412A WA2T430A WA2T470A WA2T43WA	OES ELITE 光学視管	226ABBZX00150000
ア ダ プ タ	A0460	LG 口金	13B1X00277000320
光 源 装 置	CLL-S700	VISERA ELITE Ⅲ 高輝度光源 装置 OLYMPUS CLL-S700	13B1X00277000700

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項

- 1.本製品は出荷時には滅菌していない。初回の使用前に、【保守・点検に係る事項】の指示に従って洗浄、消毒、滅菌すること。
- 2.光源装置を長時間使用した場合、本製品の内視鏡コネクタや使用直後の光源装置コネクタは非常に熱くなるので触らないこと。
- 3.内視鏡から本製品をはずす前に、必ず光源装置の電源を切ること。

不具合

その他の不具合

断線、破損、変形、腐食

有害事象

その他の有害事象

感染、やけど、目の痛み

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、本製品の『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌を行い、保管すること。

耐用期間

本製品は消耗品（修理不可能）であり、本製品の『取扱説明書』に従って使用前点検および定期点検を実施し、必要であれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄、消毒、滅菌

- 1.毎症例後直ちに、本製品の洗浄、消毒、滅菌を行うこと。手順および条件は、本製品の『取扱説明書』に従うこと。
- 2.本製品は、滅菌の前に十分に洗浄、消毒、乾燥させ、滅菌効果を妨げる微生物や有機物を除去すること。

3.本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質と言われているプリオンを消失もしくは不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で破棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインに従うこと。なお、本製品は、一般に示されている、プリオンを消失もしくは不活化する方法に対する耐久性が全くない、または、十分な耐久性がない。

使用者による保守点検事項

長期の使用により、機器の劣化は避けられない。特に樹脂などの部分は、使用する薬剤の影響や経時変化によっても劣化する。本添付文書や本製品の『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検（6 か月に一度）において以下の事項を確認すること。点検結果により必要であれば新品と交換すること。

- 1.製品に、へこみ、亀裂、ねじれ、ひずみがないこと。
- 2.ケーブルの外側に切れ目などの不具合がないこと。
- 3.スリキズがないこと。
- 4.腐食がないこと。
- 5.コネクター端面のレンズの損傷がないこと。
- 6.部品に不足や緩みがないこと。
- 7.製品上のすべての表示がはっきりと見えること。
- 8.洗浄剤や消毒剤が残っていないこと。
- 9.光が効率的に伝送されていることを確認すること。不確かな場合は、新しい本製品と比較すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

オリンパス ウィンター アンド イベ社
OLYMPUS WINTER & IBE GMBH
国名：ドイツ連邦共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。