

## フォーカルトーン™

## 【禁忌・禁止】


- 絶対に分解、改造をしないでください。  
〔故障等の原因になります。〕
- イヤークリップが耳管に装着されていない場合は使用しないでください。  
〔耳管のネジ部など金属部分で耳装着部を傷つける場合があります。〕

## 【使用目的、効能又は効果】



心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。  
ヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤークリップ  
(ユーザの耳に挿入する)を備えたヘッドギアに接続されている。

## 【形状・構造】

代表例: エキスパート (両面サスペンデッドダイヤフラム)

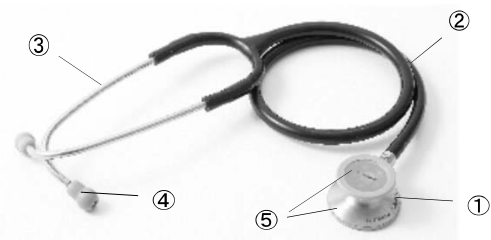

代表例: ベイシスS (ダイヤフラム面、ベル面)

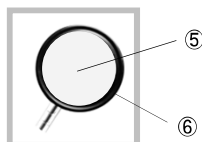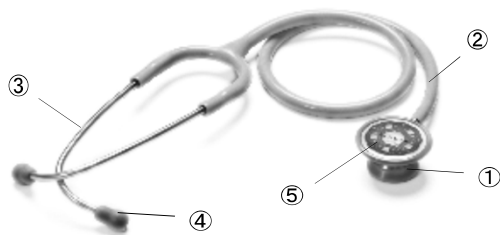

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① チェストピース | ④ イヤークリップ |
| ② Yチューブ   | ⑤ 振動板     |
| ③ 耳管      | ⑥ ノンチルリング |

## 【使用方法】

- チェストピース、チューブ、耳管と接続する。
- 耳管を耳にはさむ。
- 耳管の強弱は、耳管のバネを伸縮することで調整する。
- チェストピースを皮膚に当て聴診する。

## 【使用上の注意】

- 本器は聴診以外の目的で使用しないで下さい。
- チェストピース(振動板面、ベル面)を叩かないで下さい。  
振動板を傷めたり、耳管を装着している場合は耳に障害をきたす可能性があります。
- 本器は聴診専用ですので、大きな音は絶対に聴かないで下さい。
- 本器を振り回さないで下さい。物的損傷及び人に障害を加えたりする可能性があります。

## (各パーツの性能)

- 性能を十分活用するためにリング、イヤークリップの取り付けが緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、確実に装着して下さい。
- 振動板、リング、イヤークリップ等に傷がある場合は使用しないで下さい。皮膚を傷つける可能性があります。
- 耳管、チューブ、チェストピースの音道の中に異物が入らないように留意して下さい。故障の原因になります。

## (耳管)

- 万一耳管バネが折れた場合、聴診上に不都合が生じたり、人体に障害を加える可能性があります。
- 耳管を無理に広げたり、握りつぶしたりしないで下さい。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 保管温度  
-20~60℃
- 保管湿度  
RH85%以下
- 保管状態
  - 急激な温度変化のある所、極端に高温や低温になる所、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所は避けて下さい。
  - チューブを折り曲げたまま長時間放置しないで下さい。チューブの寿命が短くなります。

## 【保守・点検に係る事項】

- 本器が汚れた時は、柔らかい布でからぶきして下さい。  
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきして下さい。
- 故障した時は、お買い求めの販売店にご連絡下さい。

## 【包装】 1個/箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社フォーカルコーポレーション

住所:千葉県柏市十倉二581-1

電話番号:04-7145-3101(代)

製造業者:株式会社フォーカルコーポレーション