

* (基本機能)

- ・自動電源オフ機能
電源を投入し、加圧しない状態で5分以上経過すると自動的に電源が切れます。(電源スイッチ切り忘れ防止)
再度使用する場合は電源スイッチを入れます。
- ・自動バックライトオフ機能
20mmHg以上加圧しない状態で約10秒以上経過すると自動的にバックライトの照度を落とし、その後20mmHg以上加圧しない状態で約50秒経過するとバックライトを消灯します。
また、20mmHg以上に加圧すると自動的に点灯します。

(警報及び安全装置)

- ・電池電圧低下警報：
電池電圧が低下すると「電池交換サイン」が点灯し、電池交換を促す。
- ・過加圧エラー：
腕帯内圧が315mmHgを超えると液晶表示器の目盛バーの「過加圧サイン」(282-300mmHgの目盛バー)が全て点滅し警告する。

※点滅したら直ちに、排気調整バルブを全開にして急速排気を行うか、本体に差し込んであるエアチューブを引き抜く。

【使用目的、効能又は効果】

(使用目的)

腕周に巻きつける加圧可能のカフ(腕帯)、カフ(腕帯)内の空気圧を調節する弁、アネロイド式圧力計から構成される機器であり、聴診法により動脈血圧を非観血的に測定する装置である。

【品目仕様等】

(特性・性能又は機能に関する規格)

圧力測定範囲：20～298mmHg

目量：2mmHg

カフ内圧表示の誤差：±3mmHg以内

排気方式：排気調整バルブによる

圧力表示：目盛バー表示による

使用条件：周囲温度10℃～40℃

相対湿度85%RH以下(結露なきこと)

電撃保護：内部電源機器BF形装着部

本品は、EMC規格IEC60601-1-2に適合している。

【操作方法又は使用方法等】

(測定準備)

1. 「リリースボタン」を押して、「上蓋」を90度になるまでしっかり開く。
2. 必要に応じて電池をセットする。
3. 腕帯を上腕部に巻く。
4. 「電源スイッチ」を押して電源を入れる。
※“ゼロ調整完了”状態まで待つ(「液晶表示器詳細」参照)
5. ゴム球により予想血圧より高めに加圧し、聴診法にて測定を行う。
※測定中に「電池交換サイン」が点灯したら電池を交換してください。(詳細については取扱説明書を参照すること)
6. 測定後は、「ゴム球」及び「腕帯」を本体に格納し上蓋を“カチッ”と音がするまでしっかり閉める。

【使用上の注意】

(使用環境及び条件)

- ・透析治療中、又は抗凝固剤、抗血小板剤、ステロイド剤等を使用している場合は、慎重に使用してください。
[内出血を起こす可能性があります]

(使用前の注意事項)

- ・上腕の周囲長は使用する腕帯の適用範囲であることを確認してください。[測定誤差を生じることがあります]
 - ・付属品(腕帯等)以外のは使用しないでください。
[測定誤差を生じることがあります]
 - ・腕帯と本体は、エア漏れのないよう、確実に接続されているか確認してください。[測定誤差を生じることがあります]
- (使用中の注意事項)
- ・使用中にカブレ等の症状がでた場合は、直ちに使用を中止して専門家の医師に相談すること。
 - ・過加圧表示になったら直ちに「エアコントロールバルブ」を緩めて減圧するか、本体よりゴムチューブを引き抜いて減圧すること。
[うっ血などの原因になります]

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

(使用環境条件)

温度範囲10～40℃

湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)

気圧範囲70～106kPa

(保管環境条件)

温度範囲-10℃～50℃

湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)

- ・急激な温度変化のある所、極端に高温や低温になる所、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所は避けてください。

(耐用年数)

本体：5年(自主規格による)

【保守・点検に係わる事項】

(保守点検事項)

- ・電源投入の際に「目盛バー」は全て表示されること。
- ・電源スイッチはスムーズに動作すること。
- ・ゴム球、腕帯及びゴムチューブに傷等はないこと。
- ・本体の汚れ、傷がないこと。

※(清掃)

- ・本体が汚れたときは、ガーゼ等(水またはぬるま湯に浸し、よく絞る)の柔らかい布でふき取ってください。

※シンナー等の有機溶剤、ポリドンヨードでは絶対に拭かないでください。

- ・乾燥は乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、自然乾燥してください。

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

(製造販売業者及び製造業者)

株式会社フォーカルコーポレーション

〒277-0872

千葉県柏市十倉二581-1

Tel: 04-7145-3101 Fax: 04-7145-5455

Website <http://www.focalco.com>

(製造業者)

WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO., LTD

NO.1500 HAINING RD HAIBIN LONGWAN WENZHOU

325024 CHINA