

機械器具 13 聴診器


一般医療機器 一般的名称：機械式聴診器 JMDN コード：13755000

聴診器 フォニック

【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外に使用しないで下さい。
- ・本品を分解・改造しないで下さい。
- ・すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
- ・すべての操作において、定められた操作・使用方法以外の操作をしないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

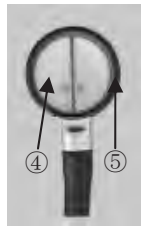

1. イヤーチップ（ポリ塩化ビニール、シリコン）
 2. 耳金具（アルミ）
 3. チェストピース（真鍮）
 4. ダイアフラム（ポリエチレン）
 5. ダイアフラムリング（ポリ塩化ビニール）
 6. Yチューブ（ポリ塩化ビニール）
- 寸法：全長700mm

【使用目的又は効果】

本製品は、人体各部の生体音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。

【使用方法等】

1. 使用前にチューブに耳金具及びチェストピースを取り付けて組み立てる。
2. 耳金具の向きを確認し、耳金具を広げて適切な方向でイヤーチップを耳孔に挿入する。
3. チェストピースのダイアフラム面を人体に押し当て聴診する。
4. 耳金具を広げ使用者の耳孔からイヤーチップを外す。
5. 使用が終了した場合や、使用中に血液、体液、その他の汚染物等で目に見えて汚染された場合、本品が破損した場合は、施設の基準に従って適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外に使用しないで下さい。
2. 本品を分解・改造しないで下さい。
3. すべての部品が装着されていない状態で使用しないで下さい。
4. 定められた操作・使用方法以外の使用をしないで下さい。
5. 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を取って下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温、常圧、水のかからない場所で適切に保管をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に必要なに応じて、耳金具、Yチューブ、イヤーチップは消毒用エタノールまたは中性洗剤で清拭して下さい。
2. 液体に浸したり、スチーム消毒をしないで下さい。また、直接高温、低温、溶剤、オイル等と接触させないで下さい。
3. 耳管は極端な張力を調整することにより、スプリングの張力を緩める恐れがあるのでご注意下さい。
4. 故障または異常が発生したときは使用を中止し、速やかに適切かつ安全な処置を取って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.(台湾)