

販売名：非接触体温計T O－4 0 1

【警告】


・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。
・機器を修理・改造・分解しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1.構成

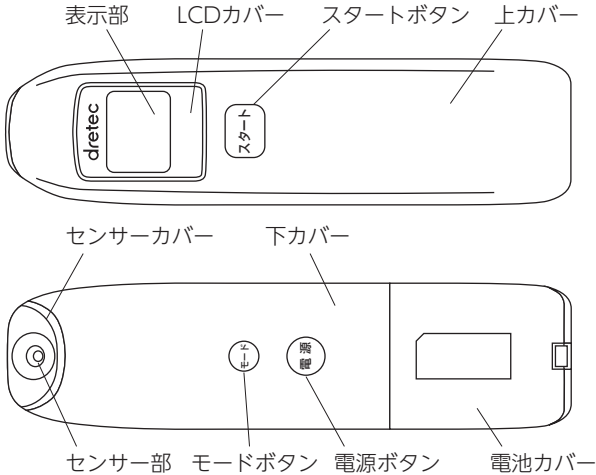

2.付属品

単4形アルカリ乾電池	2個
取扱説明書（保証書付）	1部
医療機器添付文書	1部

3.本体の寸法及び重量

本体寸法	長さ150mm幅40mm厚さ51mm
本体重量	約51g（電池を含まない）

4.電気的定格及び分類

定格電圧	DC3V（単4形アルカリ乾電池2個）
電撃に対する保護の形式による分類	内部電源機器
電源に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部

5.動作原理

人の体温を測定するための装置である。センサー部をこめかみに近づけて測定すると、こめかみの赤外線を赤外線センサーが検知し、その赤外線量をマイコンにより演算処理して体温を表示する。

6.品目仕様

検知方式	赤外線
測定部位	こめかみ
温度測定範囲	34.0℃～42.9℃ ・ <34.0℃で「Lo」表示 ・ 43.0℃≤で「Hi」表示

最小表示単位	0.1℃
測定精度	34.0≤表示温度<35.5℃：±0.3℃ 35.5≤表示温度≤42.0℃：±0.2℃ 42.0<表示温度<43.0℃：±0.3℃
記憶機能	24回
使用環境	10～40℃ 30～85%RH
保管環境	－10～60℃ 25～90%RH

本品はEMC規格：JIS T 0601-1-2:2012に適合しています。

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1.使用前

1) 電池を入れます。

2) センサー部が汚れていないことを確認します。

2.使用中

体温を測定する場合

1) 電源ボタンを押します。

2) 全表示後に記憶マーク「M」と記憶値が表示されます。

3) “ピッ”音が鳴り記憶マーク「M」と記憶値が消え、「℃」マークが点滅します。

4) モードボタンを押して「人マーク」を選択すると、体温測定モードになります。

5) こめかみから2～3cm離れた位置でセンサー部を肌に垂直に保ちます。

6) そのままスタートボタンを押して測定します。

測定が終わると「ピッ」音が鳴り測定結果を表示します。

* 検温終了ブザー「ピッ」音が6回連続で鳴った場合は、測定結果が37.5℃以上だったことをお知らせします。

3.使用后

1) 電源ボタンを押すと“ピッ”音が鳴り電源が切れます。

2) 電源を切り忘れても約1分後にピッ音が鳴り、自動的に電源が切れます。

4.続けて測定したいとき

測定結果が表示された後、約3秒後にピッ音が鳴り、再び「℃」マークが点滅したら続けて測定できます。

5.オートパワーオフ機能

電源を切り忘れても約1分後にピッ音が鳴り、自動的に電源が切れます。

6.メモリーを確認する方法

1) 電源ボタンを押します。

2) 全表示後に記憶マーク「M」と記憶値が約3秒間表示されます。

3) 記憶マーク「M」と記憶値が表示された状態でスタートボタンを押します。

4) スタートボタンを押すごとに記憶値（1）から以前の記憶値（2～24）の順に表示されます。

この時、記憶値の表示時間は約5秒で、その間、記憶マーク「M」が点滅を繰り返します。

5秒を過ぎるとピッ音が鳴り記憶マーク「M」が消えて測定モードに切り替わります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

1.使用条件及び環境上の注意事項

- 1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
また、お子様にご使用の際は、ケガに注意し、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- 2) 運動・食事・入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- 3) 測定する時は、センサー部が清潔であることを確認してください。

2.使用中の注意事項

- 1) 本体に傷や破損、故障がある場合は使用しないでください。
- 2) 身体及び機器に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
- 3) 落とすなどの強い衝撃を与えないでください。

3.使用後の注意事項

体温計はいつも清潔にお手入れしてください。ご使用後は、柔らかい布や脱脂綿等に消毒用アルコール又はぬるま湯を染み込ませて固く絞ったもので、センサー部を軽く拭いてください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- 2.長期間保管する場合は、本体から電池を外してください。
- 3.氷点下近くで保管した場合は、10℃～40℃の場所に1時間以上放置してから使用して下さい。
- 4.使用期限は5年です。（当社自己認証による）

【取り扱い上の注意】

- 1.分解・改造・修理は絶対行わないでください。
- 2.電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- 3.熱湯消毒はしないでください。
- 4.丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- 5.電池が消耗した場合、表示部の中央に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- 6.電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- 1.使用前に清潔な状態にし、作動するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
- 2.汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ドリテック
製 造 業 者	VEGA TECHNOLOGIES INC.
国 名	中華人民共和国
連 絡 先	株式会社ドリテック お客様相談センター 電話：0570-075-019 (月～金 9:00-12:00, 13:00-17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。