

類別：機械器具 16 体温計
管理医療機器 一般の名称：皮膚赤外線体温計（JMDN 17888000）
販売名：非接触体温計 T O - 4 0 6

【警告】


- ・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

- ・人以外の検温にはご使用にならないでください。
- ・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。
- ・機器を修理・改造・分解しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

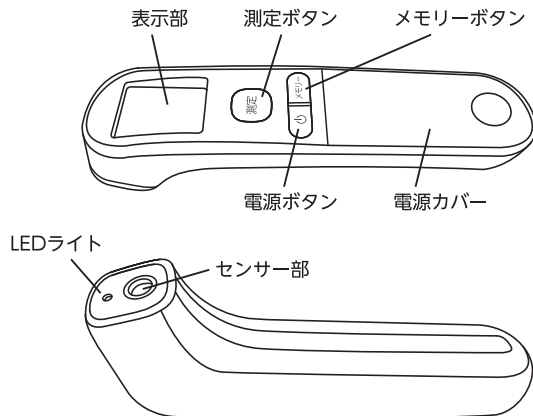

2. 主な原材料

ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコン

3. 本体の寸法及び重量

本体寸法：幅34×厚さ47×長さ156mm
本体重量：約94g（電池含む）

4. 電氣的定格及び分類

定格電圧：DC 3 V(単4形アルカリ乾電池×2個)
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部
電磁両立性：IEC 60601-1-2に適合

5. 動作原理

体温測定モードでは、額から放射される赤外線をセンサーが検知し、その赤外線量を演算処理して舌下温度に換算した体温を表示する。温度測定モードでは、物体の表面から放射される赤外線量を測定し、実測温度を表示する。

6. 品目仕様

体温測定モードの測温範囲：34.0～43.0℃
温度測定モードの測温範囲：0.1～93.2℃
体温測定モードの最大許容誤差：34.0～35.4℃：±0.3℃
35.5～42.0℃：±0.2℃
42.1～43.0℃：±0.3℃

温度測定モードの最大許容誤差：±3℃
使用環境：5～40℃、30～85%RH(結露なきこと)
保管環境：-10～55℃、25～90%RH(結露なきこと)

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1. 使用前
(1) 電池を入れます。
(2) センサー部が汚れていないことを確認します。

2. 使用中

体温の測定

- (1) 電源ボタンを押します。
電源が入り、表示部が点灯します。
- (2) 体温計マークが表示され、単位マーク「℃」とスタンバイマークが点滅し、体温測定モードになります。
- (3) 額の中心から約3～5cm離れた位置でセンサー部を向け、測定ボタンを押して測定します。
- (4) 測定が終わると表示部が点灯し、測定結果を表示します。

温度の測定

- (1) 電源ボタンを長押しします。
電源が入り、表示部が点灯します。
- (2) 温度計マークが表示され、単位マーク「℃」とスタンバイマークが点滅し、温度測定モードになります。
- (3) 測定対象物から約3～5cm離して、測定ボタンを押します。
- (4) 測定が終わると表示部が点灯し、測定結果を表示します。

3. 使用後

- (1) 電源ボタンを押すと電源が切れます。
- (2) 電源を切り忘れても約30秒後自動的に電源が切れます。
4. 続けて測定したいとき
測定結果が表示された後、再び単位マーク「℃」とスタンバイマークが点滅したら続けて測定できます。
5. メモリー機能
本体に最大9個まで測定結果を保存します。
また、測定結果を削除することもできます。
6. ミュート機能
測定時の音は、測定モード時にメモリーボタンを押して消すことができます。

【使用上の注意】

1. 使用条件及び環境上の注意事項
(1) お子様にご使用の際は、ケガに注意し、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 運動・食事・入浴の後には十分な時間をおいてから体温を測定してください。
- (3) 測定する時は、センサー部が清潔であることを確認してください。
2. 使用中の注意事項
(1) 本体に傷や破損、故障がある場合は使用しないでください。
- (2) 身体及び機器に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
- (3) 落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- (4) LEDライトを直視しないでください。
3. 使用後の注意事項
体温計はいつも清潔にお手入れしてください。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) 長期間保管する場合は、本体から電池を外してください。
- (3) 氷点下近くで保管した場合は、5～40℃の場所に30分以上放置してから使用して下さい。
- (4) 使用期限は5年です。（当社自己認証による）

【取扱い上の注意】

- (1) 分解・改造・修理は絶対行わないでください。
- (2) 電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
- (3) 熱湯消毒はしないでください。
- (4) 丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
- (5) 電池が消耗した場合、表示部に「Lo」と電池残量マークが同時に表示されます。このような場合、電池を交換してください。
- (6) 電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れは中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

＊ ＊

＊【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ドリテック

製造業者
Shenzhen Pango Medical Electronics Co., Ltd (中華人民共和国)

連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
電話：0570-075-019
(月～金9:00-12:00, 13:00-17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)