

販売名：鼻用洗浄器HK-200

【警告】


・自分で操作ができない人や7歳未満の子供には使用させない。

【禁忌・禁止】

- ・鼻孔内の洗浄以外の目的に使用しない。
- ・鼻の粘膜が弱い方は使用しない。
- ・耳鼻科および眼科の疾患がある方や過去にあった方は、専門医に相談のうえ使用する。
- ・エアゾールスプレー製品や酸素吸入器が使用されている場所では使用しない。

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

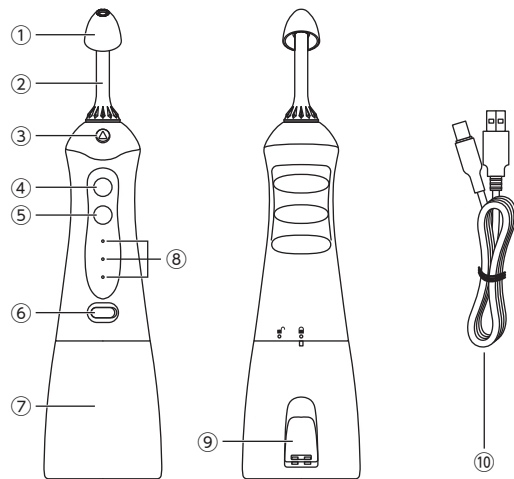

- ①ノズルヘッド ②ノズル ③ノズル取りはずしボタン
④ON/OFFボタン ⑤MODEボタン ⑥充電ポート
⑦タンク ⑧MODEランプ ⑨排水口 ⑩充電用ケーブル

2. 本体の寸法及び質量

寸法：幅72×奥行85×高さ218mm
質量：約245g

3. 電気的定格

入力：DC5V 1A
内蔵電池：充電式リチウムイオン電池 3.7V 1400mAh
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
電圧に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部

4. 原理

モーターの回転でポンプを動かし、タンク内の洗浄水を吸い上げてノズルを通して噴出させる。

5. 原材料(体に接触する部分)

ノズルヘッド：シリコーンゴム

6. 品目仕様

吐出量 normal：130±30ml/30秒
soft：90±30ml/30秒
pulse：100±30ml/30秒

使用環境：5～40℃、30～90%RH(結露なきこと)

水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IPX7

【使用目的又は効果】

食塩水を鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄する器具である。

【使用方法等】

1. 使用前
 - 1) リチウム電池を充電する。
 - 2) 洗浄水の食塩水を作る。
 - 3) タンクに洗浄水を入れ、本体を取りつける。
 - 4) 本体にノズル、ノズルヘッドを取りつける。
2. 使用中
 - 1) MODE ボタンを押してモードを選択する。
「normal」、「soft」、「pulse」から選ぶことができる。
 - 2) ノズルヘッドを鼻孔にセットする。
 - 3) ON/OFF ボタンを押して洗浄する。
洗浄中でもモードを変えることができる。
 - 4) ON/OFF ボタンを押して電源を切る。
 - 5) 軽く鼻をかむ。
3. 使用後
 - 1) タンクに残った洗浄水を捨てて洗浄する。
 - 2) タンクに新しい水を入れて本体を取り付ける。
 - 3) ON/OFF ボタンを押してノズルと本体内部を洗浄する。
 - 4) タンク内の水がすべて出し切ったらON/OFF ボタンを押して電源を切る。
 - 5) タンク、ノズル、ノズルヘッドを取りはずして洗浄し、乾燥させる。

【使用上の注意】

- (1) 小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
また、お子様にご使用の際は保護者の監視下でご使用ください。
- (2) 使用中に万一、耳・鼻・目などに何らかの異常や不調を感じた場合は直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- (3) 食塩水を使用し、水道水の直接の使用はしないでください。
- (4) 40℃以上の食塩水は使用しないでください。
- (5) ノズル、ノズルヘッドを他人と共有しないでください。
- (6) ノズルヘッドを鼻孔に密着させないでください。
- (7) 本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
- (2) ご使用後は清潔な状態で保管してください。
- (3) 標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【取り扱い上の注意】

- (1) 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 食塩水に含まれる塩の結晶が目詰まりして噴射できなくなったり、雑菌などが繁殖したりすることを防ぐため、ご使用後は必ず洗浄してください。
- (3) 煮沸消毒はしないでください。
- (4) 周囲温度 5～40℃以内の環境下で使用してください。
- (5) 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用時間が短くなります。
- (6) 本品を廃棄する際は各自治体の廃棄指示に従ってください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用前に清潔な状態にし、作動するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れがひどい場合は中性洗剤を使って洗浄してください。
- (3) 水洗いを行う場合は、洗面器等に貯めた水に浸してから汚れを拭き取るようにしてください。本製品は IPX7 に準じた防浸規格に適合しておりますが、本規格では流水等の高い水圧や長時間の浸漬については保証されておりません。

＊ ＊

＊ **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社ドリテック
製 造 業 者	Nicefeel Medical Device Technology Co., Ltd.
製造業者国名	中華人民共和国
連 絡 先	株式会社ドリテック お客様相談センター 電話：0570-075-019 (月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。