

一般医療機器
機械器具 40. 医療用のこぎり
16340000 電動式ギブスカッター
ジンマー キャスト ソー II

【警告】**「使用方法」**

- 本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。また患者の安全に細心の注意を払い添付文書に従って使用すること。〔重篤な不具合、有害事象が発現する恐れがあります。〕
- 本品の周辺での無線機器、電気メス、除細動器等、高周波を発生する機器、その他の医療機器等を近づけないこと。またこれらの機器とは別系統の電源を使用すること。〔本品及び上記の機器等に誤作動が生じるおそれがあります。〕
- 酸素又は亜酸化窒素（笑気ガス）・可燃性麻酔ガス等がある所では使用しないで下さい。〔引火による爆発の恐れがあります。〕

【禁忌・禁止】

- ギブスカッターとして以外に使用しないこと。
- 弊社が指定した製品以外との併用はしないこと〔相互作用の項参照〕。

【使用目的又は効果】

手持型の電動器具をいい、その近位端は、通常、円柱型でハンドルとなっており、遠位端はギブスを形成する石膏又は合成材料を切断する円形の刃となっている。この刃は、ハンドルに内蔵された刃を振動させるモーターにより切断することができる。のこ引きではなく振動によって切断する。

【形状・構造等】

ブレードを振動回転させることによって、ギブスを形成する石膏又は合成材料を切断することができる。



	名称	機能
①	ブレード 径 63.5mm/80.0mm 2 種類	キャストを切削するための振動板
②	ブレード押え	ブレードを本体と固定するために使用
③	電源スイッチ	本体の主電源スイッチ
④	電源コード	1 0 0 V 交流電源コンセントに接続
⑤	エアーアウトレット	モータを冷却するための空気排出口
⑥	エアーインレット	モータを冷却するための空気導入口
⑦	安全カバー	ブレードの安全性向上のために取付

＊ 安全カバーは 63.5mm 径ブレードご使用時のみに取付け可能です。80.0mm 径ブレードをご使用の際は、取付け出来ません。

1. キャストを切削するための振動板であるブレードと安全カバーをブレード押えで本体に固定する。
2. 電源コードを 1 0 0 V 交流電源コンセントに接続し、本体の主電源スイッチである電源スイッチを ON にすることにより、ブレードを振動させ、キャストを切削する。
3. モーターを冷却するために空気導入口であるエアーインレット及び空気排出口であるエアーアウトレットがある。

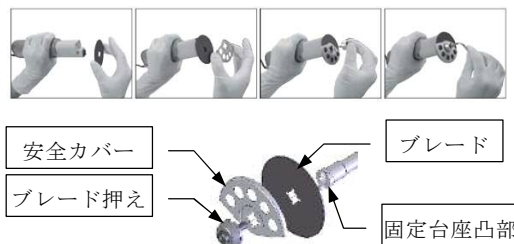
【環境条件】

	周囲温度	相対湿度
使用環境	0℃～+40℃	40%～85%
保管環境	-20℃～+60℃	30%～90%

（但し結露無きこと）

【使用方法等】

1. ブレードの操作方法

**《安全カバーの取付け》**

付属の安全カバーを取付けてご使用いただきますと、より安全性を高めることができます。

- ① ブレード及び安全カバーの取付けを行う時は、必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行うこと。
- ② ブレードを台座に取付ける。この時ブレードの溝を固定台座の凸部に合わせる。
- ③ （安全カバーを取付ける場合）安全カバーを台座に取付ける。この時安全カバーの溝を固定台座の凸部に合わせて取付ける。
- ④ ブレード押えのネジ部を固定台座にねじ込む。この時ブレード押えの凹部と固定台座の凸部を合わせる。
- ⑤ 六角レンチでネジを締め、固定する。

2. 使用方法

使用方法を守らないと火災や感電、故障、誤作動の原因になります。又、本品の機能が発揮されませんので必ず守ってください。

- ① 操作前に目で見て欠陥がないかどうかの確認をすること。
- ② 操作前に使用電源電圧を確認し、指定（交流 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z）以外での電源電圧では使用しないこと。
- ③ 電源スイッチを切った状態（OFF 位置）で、電源プラグをコンセントに確実に差し込むこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ④ 切削時、ブレードが固有の速度で作業できるよう余分な力を加えないこと。余分な力を加えてもモーターに負荷がかかるだけで切削速度は早くなりません。
- ⑤ 一連の作業の終了後は、電源コードはコンセントから外しておくこと。
- ⑥ 電源コードをコンセントから抜く時は、電源プラグを持って行い、コードを持って引抜くなど無理な力をかけないこと。

【使用上の注意】

詳細については「ジンマー キャストソー II」の取扱説明書を参照すること。

注意事項を守らないと火災や感電、故障、誤作動の原因になります。又、本品の機能が発揮されませんので必ず守ってください。

1. 重要な基本的注意

- ① ブレードは専用品のみを使用し、本体にしっかり正確に装着すること。又、摩滅したブレードは使用しないこと。
- ② ブレードは直接身体へあてないこと。
- ③ ブレードを始動させる際は、手や指に触れないように注意すること。
- ④ ブレード作動中は、台などに置かないこと。
- ⑤ 本機に異常を感じた場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜き、使用を中止すること。
- ⑥ 布などで本体の空気導入口及び空気排出口を塞がないこと。
- ⑦ 本体内部に水等が入らないようにすること。
- ⑧ 切削時にキャスト等の粉じんが発生しますので使用場所の換気には充分注意すること。
- ⑨ 本機をグラスファイバー製キャストテープ又は石膏ギプスの切削以外に使用しないこと。
- ⑩ 使用後は、使用時間よりも長めの時間休止させること。定格連続時間（15分）使用した場合は、少なくとも20分以上休止させること。

2. その他の注意

- ① 本体に水等の液体がかからない場所に設置すること。
- ② 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）のない安定した場所に設置すること。
- ③ 気圧、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- ④ 高温・多湿の場所や化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- ⑤ 滅菌・消毒等をしないこと。
- ⑥ 本品の上に物を置いたり、衝撃を与えたりしないこと。
- ⑦ 本体に落下・転倒等による衝撃が加わった場合は、使用を中止し、販売業者又は製造販売業者に連絡すること。
- ⑧ コード類の取り扱いについて次の点を守ること。
 - ア. コード類の上に重い物を載せないこと。
 - イ. 加工しないこと。
 - ウ. 無理に曲げたり、捻ったり、引っ張ったりしないこと。
 - エ. コード類が切れたり、芯線が出たりした場合は、使用を中止し、販売業者又は製造販売業者まで修理を依頼すること。

- ⑨ 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込むこと。又、傷んだプラグやゆるんだコンセントを使用しないこと。
- ⑩ 濡れた手でコード類、スイッチ類の操作をしないこと。
- ⑪ ピンやクリップ等の金属類および異物が本体内部に入らないようにすること。
- ⑫ 熱器具に近づけないこと。
- ⑬ 本品の性能の維持、安全性の確保のために、取扱説明書に記載されている始業点検を必ず行うこと。異常が認められた場合は使用せず、販売業者又は製造販売業者まで連絡すること。
- ⑭ 患者の状態及び本品に異常が無い事を常に監視すること。
- ⑮ 患者の状態及び本品に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止め、適切な措置を講じること。

3. 相互作用

・併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。
[専用品でないと設計・開発方針が異なるため、適合しない恐れがある]

【保管方法及び使用期間等】

・保管方法

- ① 本体に水等の液体がかからない場所に保管すること。
- ② 傾斜、振動、衝撃のない安定した場所に保管すること。
- ③ 気圧、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ④ 高温・多湿の場所や化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ① 保守・点検を行う時は、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。
- ② 電源プラグやコードの点検をして、傷んだり、汚れたままの使用はしないこと。
- ③ 使用後は本体をアルコール液等で清掃すること。
- ④ クリーニングの際、洗剤、水等の液体を直接本体にかけないようにすること。
- ⑤ 熱器具に近づけないこと。
- ⑥ ご自分での分解・修理や改造はしないこと。
- ⑦ 止むを得ず破棄するときは再使用できないように電源コードを切断すること。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

株式会社 的場電機製作所

Tel 049-231-2255 (代)

【販売業者の名称等】

ジンマー・バイオメット合同会社

Tel 03-6402-6600 (代)

Mar-17 76190E11

取扱説明書を必ずご参照ください。