



** 2017 年 8 月（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）
 * 2016 年 2 月（第 2 版）

認証番号：226ADBZX00209000

機械器具 58 整形用機械器具 管理医療機器 単回使用関節手術用器械 70964012

単回使用セメント用手術器械

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・変形、劣化、損傷、摩耗している機器／製品は使用しないこと[意図した機能を発揮しないおそれがある]
- ・大きな負荷をかけたり、衝撃を与えたりしないこと[破損するおそれがある]
- ・不適正な使用をしないこと[破損するおそれがある]
- ・本品をフェノール系洗剤で洗浄しないこと[ひび割れ・亀裂が生じるおそれがある]

2. 併用医療機器

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと [相互作用の項参照]

有害事象

- ・器械の使用に関連する一般的な有害事象としては、機器の原材料に対するアレルギー反応がある
- ・感染症の発現

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

常温、常湿にて保管すること。

有効期間・使用の期限

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号：03-6402-6600（代）

主たる設計を行う製造業者：

Zimmer Surgical, Inc.、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示又は本体の記載を確認すること。

種類名	製品外観
クイックキュレット	

原材料：ポリエーテルイミド樹脂

原理

本品は人工肘関節置換術等においてセメント等の量を調節する際に用いる手術器械である。本品は手動式である。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は人工肘関節置換術等の関節手術に用いる手術器械である。

**【使用方法等】

使用方法

人工肘関節置換術等の関節手術において、セメント等の量を調節する際に用いる。

本品は単回使用の手動式器械であり、再使用禁止である。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・破損した器具の破片は、除去することが推奨されるが、その判断は医師の裁量にゆだねられる。関連するリスクを考慮すること。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと [専用品でないことと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

3. 不具合・有害事象

不具合

器械に過剰な荷重をかけたり、衝撃を与えたり、不適切な取り扱いをした場合は、器械に加えインプラントの破損、折損、ルーシング、摩耗、腐食、酸化、機能の低下が発生する可能性がある。

手術手技書を必ずご参照ください