

医 01 エックス線フィルム
一般医療機器 スクリーン型医用 X 線・画像診断用フィルム (40979000)

富士直接撮影用フィルム

* ** (Super HR-S、Super HR-HA、UR-1、PX、UM-MA、
Super RX、Super HR-U、Super RX-N)

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

支持体に銀塩感光材料を塗布したもの。

【動作原理】

フィルム乳剤中のハロゲン化銀に電磁波または光が照射されると、不可視な像が形成され、この像を現像することで、診断可能な可視画像となる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フィルム株式会社
電話番号：0120-771669

販売業者：富士フィルムメディカル株式会社
電話番号：0570-02-7007（ナビダイヤル）

【使用目的又は効果】

医用画像用に設計されている X 線フィルムをいう。主に増感紙や他の可視光線から発せられた光の波長に対して感受性が高いフィルムをいう。

【使用方法等】

本フィルムを X 線フィルムカセット等に装填し、X 線撮影を行った後現像処理を行う。

【使用上の注意】

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後は、遮光のため内袋に入れたまま保管すること。
3. フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
4. 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
5. 濡れた手による取扱いは避けること。
6. 二重露光は避けること。

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。
推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【有効期間】

それぞれの商品の個包装上に明記してあります。