

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 光輝尽性蛍光板用カセット（70039000）

富士 IP カセット LC

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

コンピューテッドラジオグラフィに使用する富士IPカセット LC
です。
3連カセットには、画質向上用の鉛板があるタイプとないタイプが
あります。

【使用目的又は効果】

小児用全脊椎、小児用全下肢、成人用全脊椎および成人用全下肢
撮影などに使用する、イメージングプレート用のカセットです。

【使用方法等】

エックス線撮影 1 回ごとに、IP1 枚（カセット 1 枚）を使用しま
す。ただし、多層断層同時撮影やワンショットエネルギーサ
ブトラクション処理の場合は複数枚を使用します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 粘膜や血液などの体液が、カセットに直接触れないように
すること。
感染のおそれがあります。
- 2) 連結部材の脱着時に、指や手などをはさまないように十分注
意すること。
- 3) 水などのかかる場所で使用しないこと。
- 4) カセットは、直射日光などの当たる場所、高温、高湿な場
所で使用しないこと。また、気圧、温度、湿度、風通し、
日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪
影響が生ずるおそれのない場所で使用すること。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所で使用しないこ
と。
- 6) カセットは使用状況、使用環境によって適宜クリーニング
すること。また、カセットの汚れや付着した異物は、画像
で確認すること。
カセットのフロント板が汚れたり、異物が付着したりした
まま使用すると、読影に影響のある画像が出力される懸念
があります。また、カセットの汚れや付着した異物は目視
で見えにくい場合があります。
- 7) カセットは無水エタノールでクリーニングすること。ただ
し、無水エタノールを大量に使用したり、必要以上にクリ
ーニングしないこと。また、他のクリーニング剤を使用しな
いこと。
プラスチック部分が変色することがあります。また、内部
の部材が剥がれたり、外れたりすることがあります。
- 8) カセットには、専用のイメージングプレートを使用するこ
と。
- 9) カセットは、専用の富士コンピューテッドラジオグラフィ
に使用すること。
カセットに適合した読取装置以外での使用は、故障の原因
になります。
- 10) カセット内部に無水エタノールなどの液体や、ピンなどの
異物が入らないようにすること。
- 11) カセットを分解しないこと。
- 12) カセットを廃棄する場合は、産業廃棄物となるため、必ず
地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処
分業者に廃棄を委託すること。
- 13) カセットは、足の上などに落とさないよう注意すること。

- 14) カセットは、転倒防止部材を設置した読取装置で使用する
こと。
装置に挿入しているカセットに必要以上の力が加わると、
装置の転倒によって、けがをする懸念があります。
- 15) カセットは気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほ
こり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を生
ずるおそれのない場所で使用すること。また、撮影前後は
撮影室内などの各種放射線が当たる場所に一時置きをしないこと。
- 16) カセットは、落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与
えたりすると変形または破損することがあるので、ていね
いに取り扱うこと。
- 17) 落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えた場合はイ
メージングプレートに破損がないか確認すること。
- 18) カセットのフロント板に傷、汚れをつけないこと。
エックス線画像に影響が出る場合があります。
- 19) バーコード窓を汚したり、傷つけたりしないこと。
バーコードが読み取れなくなる場合があります。

使用上の注意の詳細は、取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - (1) カセットは水などのかからない場所に保管してくださ
い。
 - (2) カセットは高温多湿やほこりの多い場所、直射日光が
当たる場所、強い紫外線を含む各種放射線の当たる場
所を避けて保管してください。
 - (3) カセットラック、ポータブル撮影装置の収納ラックは
鋭利な突起などがない物を使用してください。
- 2) 動作保証条件
カセットを使用の際は下記の環境条件を守ってください。
保管時 温 度：0℃～45℃
湿 度：10%RH～90%RH（結露なきこと）
冬季など乾燥しすぎる場合は加湿してください。
- 3) 有効使用期間
3 年[自己認証（当社データによる。）]
（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用さ
れ、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした
場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある）

【保守・点検に係る事項】

保守・点検に係る事項は、取扱説明書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フイルム株式会社

電話番号：0120-771669

販売業者：富士フイルム メディカル株式会社

電話番号：03-6419-8033