

医 01 エックス線フィルム
一般医療機器 画像診断用自己現像フィルム (40983000)

富士ドライ画像記録用フィルム D I - T シリーズ ** (DI-AT、DI-HT)

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

支持体に感熱材料を塗布したもの。

【動作原理】

フィルム乳剤中の熱応答性マイクロカプセルにサーマルイメージャからの熱が加えられると、発色反応を起こし、目に見える黒い画像が形成される。この黒い画像が診断画像となる。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フィルム株式会社
電話番号：0120-771669

販売業者：富士フィルムメディカル株式会社
電話番号：0570-02-7007（ナビダイヤル）

【使用目的又は効果】

医科画像診断に用いるため特別に設計された自己現像式の写真フィルムをいう。

【使用方法等】

フィルムに適合したイメージャに装填し、ハードコピー用として使用する。

【使用上の注意】

1. 開封後は、遮光のため内袋に入れたまま保管すること。
2. フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
3. 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
4. 濡れた手による取扱いは避けること。
5. 二重露光は避けること。

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。
推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【有効期間】

それぞれの商品の個包装上に明記してあります。