

送水タンク WT-3JW

【形状・構造及び原理等】

* <形状>

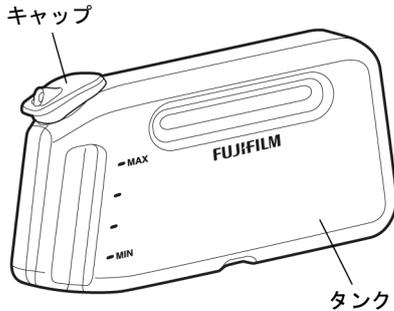


図1

1. 仕様

項目	諸元
寸法 (W×H×D)	83×168×316mm
容量	2L

<構造・構成ユニット>

** 1. 体に接触する部分の組成

タンク: ポリプロピレン

キャップ: ポリメチルペンテン

<作動・動作原理>

本製品は、当社指定の内視鏡用送水装置に接続して、体腔内に送液するための貯水タンクである。

【使用目的又は効果】

本製品は、当社指定の内視鏡用送水装置と組み合わせて、体腔内に送液するために貯水することを目的とする。

【使用方法等】

<使用方法>

- 用途に応じたレベルの消毒または滅菌を行った本製品を用意する。
- 本製品の指定水位まで滅菌水を注ぐ。
- 本製品を当社指定の内視鏡用送水装置のタンクトレイに取り付ける。
- キャップを開け、ポンプチューブをキャップの挿入口に挿入する。
- 使用後は内視鏡用送水装置から取り外し、決められた方法で洗浄、消毒または滅菌を行う

** <組み合わせて使用する医療機器>

本製品は以下の医療機器と組み合わせて使用する。

販売名	届出・認証・承認番号
送水装置 JW-2	220AABZX00187000
内視鏡用送液システム	30200BZX00303000
鉗子口用送水チューブ JT-3RC	14B1X10022A0D010
副送水口用送水チューブ JT-3RW	14B1X10022A0D011
鉗子口用ディスプレイポータブル送水チューブ JT-3DC	14B1X10022A0D013
副送水口用ディスプレイポータブル送水チューブ JT-3DW	14B1X10022A0D014

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 準備と点検

- 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
- 本製品のキャップは閉めた状態で使用すること。そうしないと、異物が混入し、感染の原因となるおそれがある。
- 本製品の水は、滅菌水を使用し、毎日入れ替えること。そうしないと、感染の原因となるおそれがある。
- 本製品に滅菌水を入れる際は、装置に水が掛からないように装置から離して行うこと。感電事故をおこすおそれがある。
- カートの移動の際は本製品内の水を空にした状態で行うこと。
- 本製品をタンクトレイに確実にセットすること。機器に滅菌水がかかり、感電のおそれがある。

2. 洗浄・消毒・滅菌

- 本製品は、あらかじめ滅菌が行われていない。初めて使用するときは、用途に応じたレベルの消毒または滅菌を行うこと。
- 使用後は、洗浄、消毒または滅菌を行うこと。不十分な洗浄は、感染の原因になる。
- 洗浄・消毒・滅菌は、当社指定の内視鏡用送水装置の取扱説明書の指定の条件で行うこと。

3. 手入れ方法

- 症例が終わるごとにただちに、洗浄、消毒または滅菌を当社指定の内視鏡用送水装置の取扱説明書の手順に従って十分に行うこと。感染のおそれがある。
- 消毒を行うときは、十分に換気すること。浸漬槽のふたを開けて浸漬すること。消毒液の蒸気は、人体に悪影響を与えるおそれがある。
- 薬液浸漬後は、残留している薬液を滅菌水で洗い流すこと。消毒液が患者の体内に流れ込むおそれがある。

4. 保管

- 本製品は、乾燥してから清潔な場所に保管すること。感染のおそれがある。

【使用上の注意】

<不具合・有害事象>

* [その他の有害事象]

本製品の使用に伴い、以下のような有害事象が起こる可能性がある。

感染、感電、損傷、化学的損傷、検査中断

【保管方法及び有効期間等】

* <保管方法>

薬液消毒または滅菌した本製品を保管する。本製品は、清潔な場所で保管すること。

<使用期間>

使用期間は適切な保守点検を行った場合、使用開始から 1 年間または製造から 3 年間のいずれか早い方とする。

「自己認証（当社データ）による」

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検の詳細は、当社指定の内視鏡用送水装置の取扱説明書を参照すること。

<使用者による保守点検事項>

点検項目	頻度
本製品の外観に著しい変形がないことを確認	毎症例

長期間使用していると機器の傷みが進み、使用薬剤や経時変化によっても劣化する。

リプロセスおよびオートクレーブ滅菌の回数を重ねることにより、部品の劣化または機能が低下する場合がある。

本製品は、弊社指定の条件で 144 回までのオートクレーブ滅菌耐性を弊社にて確認しているが、使用回数にかかわらず、異常などが見つかった場合は、交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：0570-02-7007（ナビダイヤル）