

歯科材料2 歯冠材料
管理医療機器 アクリル系レジン歯 70807000

レジン前歯

** 【形状・構造及び原理等】

珽瑯部、象牙部の2層構造よりなる人工歯（前歯）である。

1) 成分：

層の名前	成分
珽瑯部	PMMA、その他
象牙部	PMMA、その他

2) 形態及び大きさ：バイオ形態

上顎

形態	呼び寸法	形態	呼び寸法
方型	424	尖型	543
	425		544
	446		546
尖型	513	卵円型	615
	514		624
	515		625
	516		633
	517		634
	534		635
	535		

下顎

形態	呼び寸法	形態	呼び寸法
長種	23	中種	33
	25		34
	26		35
	27		36

** 3) 色調：9色

4、6、55、56、58、A1、A2、A3、B2

4) 原理

本材を義歯床に排列・結合することで、総義歯、局部義歯の製作に用いる。

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

本材を使用して、通法により義歯の製作を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ろう義歯製作の際に、人工歯部に火災があたらないように注意すること。
- 2) 本材は、熱可塑性レジン系の床用樹脂と接着しないので、必ず機械的維持を付与して使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材を研削、研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるため局所吸塵装置、防塵マスク、保護眼鏡などを使用し、作業により発生する粉塵を防御すること。

[その他の注意]

患者が義歯を使用する上での一般的な注意として以下を指導してください。

・義歯を清潔に保つこと。食後、軟らかい義歯用歯ブラシを使用し、食物残渣などを軽く取り、清掃すること。また、義歯洗浄剤などを併用すればより効果的である。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 滋賀松風
住所 〒529-1802
滋賀県甲賀市信楽町黄瀬 2296

製造業者 株式会社 松風

販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11

電話番号 075-561-1112

モールドチャート等をご参照ください。