

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 アクリル系レジン歯 70807000

松風リアルクラウン前歯

**【形状・構造及び原理等】

珐瑯部、象牙部の2層構造よりなる人工歯(前歯)である。

1) 成分

層の名前	成分
珐瑯部	PMMA、その他
象牙部	PMMA、その他

2) 形態及び大きさ

上下	形態	大きさ	左右	部位
上顎 下顎	S(方型)	3	左側 右側	中切歯 側切歯 犬歯
	T(尖型)	4		
	O(卵円型)	5		
	C(混合型)	6		
	SS(短方型)	6		

** 3) 色調: 6色

55、56、58、A2、A3、A3.5

4) 原理

本材を義歯床に排列・結合することで、総義歯、局部義歯の製作に用いる。

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

本材を使用して、通法により義歯の製作を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ろう義歯製作の際に、人工歯部に火災があたらないように注意すること。
- 本材は、熱可塑性レジン系の床用樹脂とは接着しないので、必ず機械的維持を付与して使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本材の研削、研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスク、保護眼鏡などを使用し、作業により発生する粉塵を防御すること。

[その他の注意]

患者が義歯を使用する上での一般的な注意として以下を指導してください。

- 義歯を清潔に保つこと。食後、軟らかい義歯用歯ブラシを使用し、食物残渣などを軽く取り、清掃すること。また、義歯洗浄剤などを併用すればより効果的である。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 本材は、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

モールドチャート等をご参照ください。