

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000
松風ステップルシートワックス

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：薄板状、15×7.5cm
- 2) 種類：9 種類（3 種：コース、ミディアム、ファイン）
（厚さ：各 3 種 0.35mm、0.40mm、0.50mm）

[構造]

成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
その他

【使用目的又は効果】

鑄造床用のシートワックスとして用いる。

【使用方法等】

適当な種類のものを選び、耐火模型上にそのまま又は必要に応じて均一に軟化して圧接します。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605 - 0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112