

歯科材料7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000

松風ラインワックス

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：青色線状
- 2) 種類：丸 R06、R08、R10、R12、R15
半丸 HR15、HR16、HR18、HR20、HR30
リングルバー L33、L40、L43
パラタルバー P50、P53
(番号×1/10mmが断面の長径寸法にあたる)

[構造]

成分：マイクロクリスタリンワックス、その他

[仕様]

融点：63.5℃

【使用目的又は効果】

スプルー、バー、クラスプや金属床維持部のワックスパターン製作に用いる。

【使用方法等】

- 1) スプルーの場合
適当な種類のものを選び、スプルー線としてワックスパターンと溶着させ、鑄造ろう型を製作する。
- 2) バー、クラスプの場合
バークラスプの形状により適当なものを選び、模型上にそのまま又は必要に応じて軟化、圧接して鑄造床用ろう型維持部を製作する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 2) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112