

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント 16709002

松風ハイ-ユージノールセメント

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又は酸化亜鉛ユージノールセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又は酸化亜鉛ユージノールセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】

〔成分〕

構成	性状	成分
粉	粉	酸化亜鉛、ロジン、酢酸亜鉛、けい酸アルミニウム、HY 材、その他
液	液	チョウジ油

〔原理〕

主成分の酸化亜鉛とユージノールがキレート結合し、ユージノール亜鉛を生成することにより硬化する。

※【仕様】

JIS T 6610：2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」
タイプ 1（仮着）及びタイプ 5（仮封）

項目	タイプ 1	タイプ 5
硬化時間(37℃)*	3 分	3 分 30 秒

※JIS 試験方法による

【使用目的又は効果】

暫間補綴物の仮着、仮封に用いる。

※【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 粉液の採取（標準粉／液比は 4.4 g／1.0 g）
特に仮着物の取りはずしを容易にする場合は、液をやや多く練和します。（液は経時的に黄色～黄褐色に変色することがあるが性能には影響ありません。）
- ※ 2) 練和
粉と液を紙練板又はガラス練板上に採取し、粉を 2～3 等分し、液中に徐々に投入し、約 30 秒間で均一に練り上げます。練和量が多いときや硬め（パテ状）に練和する場合は 1 分程度で練和します。
練和温度条件：23±2℃
練和湿度条件：50±5%
練和時間：30 秒
操作時間：2 分
- 3) 仮封、仮着
練和後直ちに適用しますが、形成した歯面はエアやアルコールで乾燥させずに使用します。余剰セメント泥は軟らかいうちに除去します。なお、初期硬化は仮封、仮着後 4 分程度です。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 永久補綴物の仮着には使用しないこと。
- 2) 液を採取する際は、容器を逆さにして気泡を抜いてから計量すること。
- 3) 正しい計量のために、液容器のノズルに付着した液は、湿ったガーゼなどで拭き取ること。
- 4) 粉及び液の容器は、使用后すぐに密栓すること。特に粉は、湿気に触れないように注意すること。
- 5) 仮着や仮封に使用する場合は、歯面を乾燥させずに濡れた状態で使用すること。
- 6) 露髄又は窩洞が歯髄に近接した場合は、水酸化カルシウム製剤等を用いて歯髄保護を行うこと。

※【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ※ 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ※ 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ※ 3) 粉、液又は練和物との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭った後、大量の流水で洗浄すること。
- ※ 4) 粉、液又は練和物が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高湿度を避け室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

〔記載の使用期限は当社データによる。〕

※(例)  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112