

歯科材料5 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用テンポラリーストッピング 70867000

## 松風テンポラリーストッピング

### 【禁忌・禁止】

- 1) 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者への適用及び歯科医療従事者の使用は禁止。
- 2) 本材及び本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

[構成]

性状	成分
円柱状	酸化亜鉛、パラフィンワックス、ガッタパーチャ、蜜ロウ、その他

色調：3色（ホワイト、ピンク、イエロー）

[原理]

本材は、加熱することにより軟化し、冷却により固化する。

### 【使用目的又は効果】

治療中の歯の一時的な暫間修復に用いる。

### 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 適用する歯面を乾燥します。
- 2) ストッピングキャリア等を用い、加熱軟化させてから、窩洞に填入し、インスツルメントで圧接、形態修整をします。
- 3) 撤去は加熱したエキスカベーター等を挿し込んで軟化させて取り出します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材は、必要以上に加熱しないこと。
- 2) 填入時に使用する加熱したインスツルメントは、軟組織に触れないように注意すること。

### \* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- \* 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- \* 3) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 4) 天然ゴムと接触する機会の多い方々は、天然ゴムアレルギー発生のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光等を避けて、室温（1～30℃）、で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112