

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 70858000

松風ココアバター

【禁忌・禁止】

- 1) 本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[成分]

性状	成分
ペースト	ココアバター、白色ワセリン

[原理]

歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント、歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメントの硬化時において、その表面に本品を塗布することにより水分との接触を防ぎ、セメント表面の硬化を促進又は保護する。

【使用目的又は効果】

歯科接着・充填材料の表面の硬化促進又は保護に用いる。

* 【使用方法等】

[使用方法]

本材をチューブから取り出し、通法により充填又は支台築造したセメント表面に塗布します。セメントが十分に硬化したことを確認後、本材を水洗又はアルコール綿球により除去します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 分離する可能性があります。品質には問題ありません。
- 2) 使用後すぐに密栓すること。
- 3) 併用するセメントについては、当該製品の添付文書等にしたがって使用すること。

* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- * 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- * 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光等を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に管理・保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112