

## セラマージュ研磨キット

### \*【形状・構造及び原理等】

フィッシャーカーバ、松風シリコンポイント、松風ピボットブラシ、松風フェルトホイール、デュラポリッシュ及び松風マンドレルより構成される。

【構造】

- 1) フィッシャーカーバ、松風シリコンポイント、松風ピボットブラシ、松風マンドレル

種類	作業部	軸部	軸部形式
フィッシャーカーバ	タングステンカーバイド	ステンレス鋼	軸部形式2 (HP用)
松風シリコンポイント HR	アルミナ砥粒を合成ゴムで結合	ステンレス鋼	
松風ピボットブラシ	羊毛	ニッケルメッキ鋼	
松風ピボットブラシ SC	SiC含有ポリアミド繊維	ニッケルメッキ鋼	

- 2) 松風フェルトホイール  
羊毛製の円盤状フェルト

種類	大きさ	厚さ
#1602	φ16mm	2mm
#2405	φ24mm	5mm

- 3) デュラポリッシュ  
ワックスに研磨砥粒を分散したワックス研磨コンパウンド

種類	砥粒	成分	色調
デュラポリッシュ	アルミナ	ミツロウ、顔料、その他	青紫色
デュラポリッシュ ダイヤモンド	ダイヤモンド	ミツロウ、ステアリン酸、その他	淡灰色

### 【使用目的又は効果】

硬質レジンの研磨から艶だし仕上げ研磨までを行う研磨キットである。

### 【使用方法等】

【使用方法】

- 1) フィッシャーカーバで咬合面の細部調整を行います。
- 2) 松風シリコンポイント HR 及び松風ピボットブラシ SC で表面の傷を落として面を整えます。
- 3) 松風ピボットブラシとデュラポリッシュを使用して仕上げ研磨を行います。
- 4) 松風ピボットブラシ及び松風フェルトホイールとデュラポリッシュ ダイヤを使用して艶出し研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本材はハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) フィッシャーカーバの使い始めは、破折に注意すること。
- 4) フィッシャーカーバは、作業部の先端0.8mm位までを使用し、その他の部分（作業部側面等）を使用しないこと。
- 5) フィッシャーカーバは、指の突き刺しや作業部の破折等取扱には充分注意すること。
- 6) デュラポリッシュは、高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるので、10,000min<sup>-1</sup>以下で使用すること。
- 7) デュラポリッシュは、容器から本材が飛び出す恐れがあるため、強く押し付けないこと。
- 8) 松風マンドレルは、必ず右(正)回転で使用すること。
- 9) 本材は、口腔内では使用しないこと。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 下記の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

種類	最高許容回転速度
フィッシャーカーバ	50,000min <sup>-1</sup>
松風シリコンポイント	20,000min <sup>-1</sup>
松風ピボットブラシ	10,000min <sup>-1</sup>
松風フェルトホイール	10,000min <sup>-1</sup>

- 2) フィッシャーカーバは、作業部が細く、長いので破折しやすいため、できるだけ軽いタッチで、破折に注意しながら使用すること。
- 3) こじたり、ねじったりするような力を加えないこと。
- 4) 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 5) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）などのある本材は使用しないこと。
- 6) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 7) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡を使用すること。
- 8) 本材は、口腔内での使用は避けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・高温・直射日光を避け、常温（15～25℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11

\*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482