

歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用焼石膏 70897010

松風ソフトプaster

*【形状・構造及び原理等】

[成分]

性状	成分
粉	硫酸カルシウム半水塩、けい藻土、その他

*【仕様】

(試験室温 23℃)

項目	仕様
混水量 (粉 100 g に対して)	105mL
硬化時間	3分
硬化膨張	0.1%
圧縮強さ (2時間後)	1.0MPa 以上

※自社試験による

【使用目的又は効果】

- 1) 硫酸カルシウムを主成分とするボクシング用焼石膏である。
- 2) 有床義歯、特に総義歯製作時の最終印象に石膏を注入する際の隔壁として、完成義歯の辺縁形態の保護・確定するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 粉 100g に対し水 105mL の割合で計量します。
- 2) 練和時間は 20～30 秒で、手早く均一に練和し、予め準備した枠内に注入します。
- 3) 義歯の咬合面側から静かに押し込みます。
- 4) 硬化後、周囲の枠を取り除いて辺縁のトリミングを行います。次に周縁に紙テープ等を巻きます。
- 5) 本材に分離材を塗布した後、模型用石膏を練和して注入し、硬化後ボクシング部分を分割して除去します。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 2) 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- 3) 本材の硬化物を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

※(例)  YYYY - MM - DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112