


機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 35700000

プロアーチフェイスボウ

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

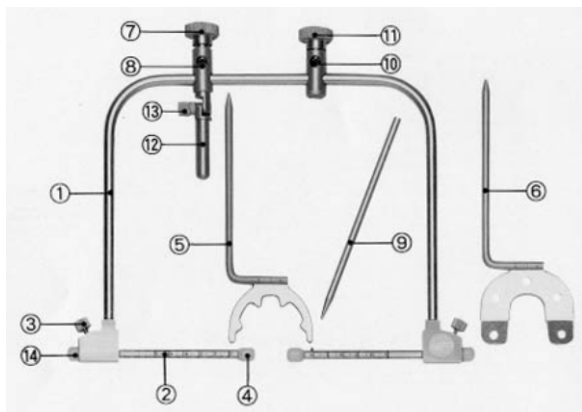

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112

〔構成〕

番号	部品名称
①	フェイスボウ本体
②	イヤーロッド（右と左は別形状）
③	イヤーロッド固定ネジ
④	イヤーピース
⑤	無歯顎用バイトフォーク
⑥	有歯顎用バイトフォーク
⑦	バイトフォーク固定ネジ
⑧	バイトフォーク・クランプ
⑨	アンテリア・リファレンスピン
⑩	アンテリア・リファレンスピン・クランプ
⑪	アンテリア・リファレンスピン固定ネジ
⑫	エレベータティングロッド
⑬	エレベータティングロッド固定ネジ
⑭	イヤーロッド・ストッパー

〔寸法〕

外径寸法 本体：幅 275×奥行き 200×高さ 23mm

〔原理〕

本器を患者に装着することにより、上顎弓の相対位置を記録し、これを模型のセットされた咬合器に装着することにより、実際に近い位置関係を再現する。

【使用目的又は効果】

咬合器に補綴物の上顎模型を水平基準平面に装着する際と外聴道又は顎頭点との位置関係を記録する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

頭位水平基準面かアキシス・オルビタル平面かを選択し、自然頭位の水平基準面を用いる場合は、後方基準点を外聴道とし、前方基準点は内眼角より 23mm 下方の点を基準とします。又は、アキシス・オルビタル平面を用いる場合は後方基準点は顎頭点とし前方基準点は眼窩下点を基準とし、位置関係を記録し本器を咬合器に組み込み、上顎模型をバイトフォークに適合させ咬合器の上顎弓に模型を装着します。

取扱説明書等を必ずご参照ください。