

歯科材料6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 70883000

松風 咬合紙

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：121mm（長さ）×22mm（幅）×38 μ m（厚さ）のカーボンシート
- 2) 種類：2種類（赤色、青色）

[原理]

上下歯列の間に入れて噛み合わせるにより、上下の歯や修復物・補綴物が当たっている部分にカーボン紙の赤色又は青色が転写され、咬合状態を確認することができる。

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製及び調整するために、上下歯列の噛み合わせや上下顎の位置関係を記録するものである。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本材を口腔内に入れ、上下の歯や修復物・補綴物で噛み、咬合印記を行う。
- 2) 本材を取り外し、通法に従って咬合調整を行う。

【使用上の注意】

- 1) 本材は患者毎に取り換えて使用すること。
- 2) 本材は色つきのカーボン紙であるため、衣類や皮膚に付着させないように取り扱うこと。
- 3) 指に色が付着した場合は、速やかに中性洗剤で手を洗い、他への付着を防ぐこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、及び直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

※(例)  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY年 MM月 DD日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112