

オーソラインアーチワイヤー マルチストランド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 本材はニッケルを含有しています。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又は類似成分の合金に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 3) 本材は再使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1) 構造

本材は、複数のステンレス鋼線を縫り合わせた歯列矯正用ワイヤーである。


合金組成：JIS G 4308 [ステンレス鋼線材 SUS 304 相当]
(ニッケル、クロム、マンガン、鉄、その他含有)

①ラウンドタイプ：

シングルストランドのワイヤーの周りを 5 本のステンレススチールワイヤーで巻き合わせたワイヤーである。

②レクタングュラータイプ：

8 本のステンレススチールワイヤーを編み上げたワイヤーである。

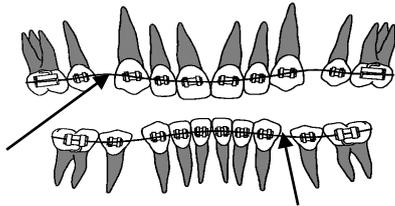

2) 形状

①アーチワイヤー

* ラウンドタイプ：円形断面（上顎：3種、下顎：3種）

	ワイヤーの形状	センターマーク	断面の直径φ (mm)
上顎 又は 下顎	Sアーチ	E (エッチング)	0.39
			0.44
			0.50

* レクタングュラータイプ：長方形断面
(上顎5種、下顎5種)

	ワイヤーの形状	センターマーク	断面の寸法 (mm)
上顎 又は 下顎	Sアーチ	E (エッチング)	0.41×0.56
			0.43×0.64
			0.46×0.64
			0.48×0.64
			0.53×0.64

②ストレートワイヤー

* ラウンドタイプ：円形断面（4種）

ワイヤーの全長	断面の直径φ (mm)
356mm (14インチ)	0.39
	0.44
	0.50
	0.55

* レクタングュラータイプ：長方形断面（5種）

ワイヤーの全長	断面の寸法 (mm)
356mm (14インチ)	0.41×0.41
	0.41×0.56
	0.43×0.64
	0.46×0.64
	0.48×0.64

【使用目的又は効果】

歯列矯正治療に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 通法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定します。
- 2) 本材を治療計画やブラケットのスロットに合わせて選択します。
- 3) 本材をブラケットのスロットに嵌め込みます。
- 4) 通法により結紮を行います。

**【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ** 2) 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。[自己認証による]

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて、保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
**電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482

製造業者 Ultimate Wireforms, Inc.
アルティメート ワイヤフォームズ
国名 アメリカ