

オーソラインアーチワイヤー T i - N i

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 本材はニッケルを含有しています。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材は再使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1) 構造

本材は、ニッケルチタン合金製の歯列矯正用アーチワイヤーである。

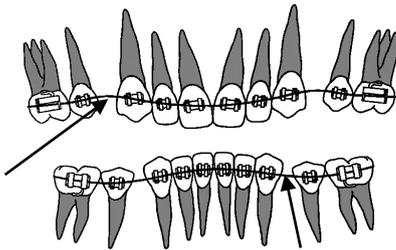

2) 形状：

*①ラウンドタイプ：円形断面（上顎：7種、下顎：7種）

		Sアーチ	RCS
	センターマーク1種	断面の直径φ 5種 (mm)	断面の直径φ 2種 (mm)
上顎 又は 下顎	D (ディンプル)	0.30	0.41
		0.36	0.46
		0.41	
		0.46	
		0.51	

*②レクタングラータタイプ：長方形断面
(上顎：9種、下顎：10種)

		Sアーチ	RCS
	センターマーク1種	断面の寸法 6種 (mm)	断面の寸法 4種 (mm)
上顎 又は 下顎	D (ディンプル)	0.41×0.41	0.41×0.56
		0.41×0.56	0.43×0.64
		0.43×0.64	0.46×0.64 (下顎のみ)
		0.46×0.64	0.48×0.64
		0.48×0.64	
		0.53×0.64	

【使用目的又は効果】

歯列矯正治療に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 通法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定します。
- 2) 本材を治療計画やブラケットのスロットに合わせて選択します。
- 3) 通法により結紮を行います。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- **2) 本材については、試験によるMR安全性評価を実施していない。[自己認証による]

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて、保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町11
（お客様サポート窓口）075-778-5482

*電話番号

製造業者 Ultimate Wireforms, Inc.
アルティメート ワイヤフォームズ
アメリカ

国名