

## オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】


- 1) 本材又は類似成分の合金に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材は再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 構造

本材は、歯列矯正において弾性領域が広く、二次的に容易にブライヤーで形態付与がし易いチタン合金製の歯列矯正用ワイヤーである。

合金成分：(チタン、モリブデン、ジルコニウム、スズ)

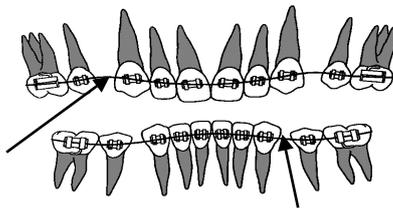

#### 2) 形状

##### ①アーチワイヤー

- ・ラウンドタイプ：円形断面 (上顎2種、下顎2種)

|                | ワイヤーの形状 | センターマーク      | 断面の直径φ (mm) |
|----------------|---------|--------------|-------------|
| 上顎<br>又は<br>下顎 | Sアーチ    | E<br>(エッチング) | 0.41        |
|                |         |              | 0.46        |

- ・レクタングュラータイプ：長方形断面

(上顎6種、下顎6種)

|                | ワイヤーの形状 | センターマーク      | 断面の寸法 (mm) |
|----------------|---------|--------------|------------|
| 上顎<br>又は<br>下顎 | Sアーチ    | E<br>(エッチング) | 0.41×0.56  |
|                |         |              | 0.43×0.64  |
|                |         |              | 0.46×0.46  |
|                |         |              | 0.46×0.64  |
|                |         |              | 0.48×0.64  |
|                |         |              | 0.53×0.64  |

##### ②ストレートワイヤー

- ・ラウンドタイプ：円形断面 (5種)

| ワイヤーの全長          | 断面の直径φ (mm) |
|------------------|-------------|
| 356mm<br>(14インチ) | 0.41        |
|                  | 0.46        |
|                  | 0.69        |
|                  | 0.81        |
|                  | 0.91        |

- ・レクタングュラータイプ：長方形断面 (6種)

| ワイヤーの全長          | 断面の寸法 (mm) |
|------------------|------------|
| 356mm<br>(14インチ) | 0.41×0.56  |
|                  | 0.43×0.64  |
|                  | 0.46×0.46  |
|                  | 0.46×0.64  |
|                  | 0.48×0.64  |
|                  | 0.53×0.64  |

### 【使用目的又は効果】

歯列矯正治療に用いる。

### 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 適法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定します。
- 2) 本材を治療計画やブラケットのロットに合わせて選択します。
- 3) 適宜、ワイヤーに必要なアーチ、ループ又はベントを付与します。
- 4) 本材をブラケットのロットに嵌め込みます。
- 5) 適法により結紮を行います。

### \*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- \* 2) 本材については、試験によるMR安全性評価を実施していない。 [自己認証による]

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて、保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町11

\*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482

製造業者 Ultimate Wireforms, Inc.  
アルティメート ワイヤフォームズ  
国名 アメリカ