

機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 35700000
パナデントフェイスボウシステム

【形状・構造及び原理等】

[形状]



[構成]

パナマウントフェイスボウ

品名	部品名
パナマウント フェイスボウ	フェイスボウ
	ナジオンリレーター
	オービタルポインタ
	バイトフォークシステムアッセンブリー
	マウンティングフィクスチャーL&H
	ヘックスレンチ

[寸法]

外形寸法

本体：長さ 230×幅 180×高さ 30 mm

[原理]

診断及び矯正装置や補綴物の製作に使用し、患者の咬合機能を技工室で再現するのに用います。

【使用目的又は効果】

診断及び矯正装置や補綴物の製作のため、アキシス・オルビタル平面を基準として患者の上顎模型を咬合器に装着する際に用います。

【使用方法等】

[使用方法]

後方基準点は、パナマウントフェイスボウの左右のイヤープースを外耳に挿入することで平均的な顎頭軸を基準とします。前方基準点は、ナジオンリレーターを用いることで眼窩下点を基準とし、それぞれを通るアキシス・オルビタル平面を用いて、上顎歯列の位置関係を記録し、バイトフォークシステムアッセンブリーを咬合器にセットし、上顎模型をバイトフォークに適合させ咬合器の上顎弓に模型を装着します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112

取扱説明書等を必ずご参照ください。