

## 松風ヘッドギア


### 【禁忌・禁止】

本材のリバースプルマスクのフレームにはニッケルを含有している。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

[構成]

#### 1) ハイブルヘッドキャップ

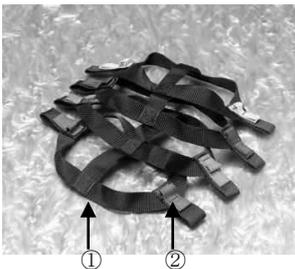


番号	各部の名称
①	ストラップ
②	リボン

サイズ：M

色調：ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド、ブラック


#### 2) サービカルネックパッド

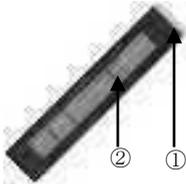

番号	各部の名称
①	パッド
②	リボン

色調：ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド、ブラック


#### 3) セーフティーリリースモジュール

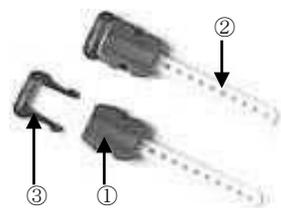

番号	各部の名称
①	モジュール本体
②	モジュールストラップ
③	リリースクリップ

色調：ブラック、ネオンブルー、ネオンピンク、ネオングリーン、ネオンオレンジ、ネオンイエロー  
フォース：ライト、ミディアム、ヘビー

#### 4) リバースプルマスク

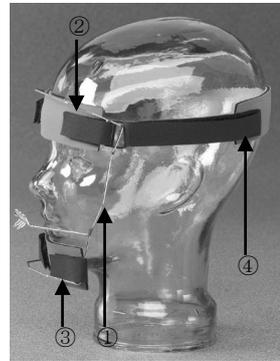

番号	各部の名称
①	フレーム
②	ヘッドパッド
③	チンパッド
④	ヘッドストラップ

フレームの材質：ステンレス鋼線

サイズ：S、M

色調：ブラック、ブルー、ピンク

### 【使用目的又は効果】

顎外固定装置のヘッドギアに用いる。

### 【使用方法等】

#### 1. ハイブルヘッドキャップ及びサービカルネックパッド

##### 1) 患者装着の前準備

- ①患者にあったキャップ及びパッドを選択する。
- ②セーフティーリリースモジュールをリボンに装着する。
- ③モジュールストラップを左右に引っ張り、正しく作動することを確認する。

##### 2) 大白歯チューブにフェイスボウを装着する。

- 3) 必要な牽引力が得られる長さのモジュールストラップの孔にフェイスボウの OUTER BOU FOCK を掛ける。

##### 4) リリースクリップをモジュール本体に固定し、装着する。

#### 2. リバースプルマスク

##### 1) 患者装着の前準備

- ①患者にあったサイズを選択する。
- ②患者の顔に合わせ、ヘッドストラップの長さを調節する。
- ③ヘッドパッドとチンパッドの余分な部分はハサミで切り、おでこや口唇の邪魔にならないことを確認する。

##### 2) アーチワイヤーやブラケットのフックに必要な牽引力が得られるエラスティックを掛ける。

##### 3) フレーム前方のフックにエラスティックを掛けて、リバースプルマスクを装着する。

### \* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

- \* 2) 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。[自己認証による]

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・水濡れ、多湿を避けて、外圧及び汚染を受けないように室温下で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福稲上高松町 11

\*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482