

## Ti-Ni コイルスプリング

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 1) 本材はニッケルを含有しています。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又は類似成分の合金に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 3) 本材は再使用しないこと。


### 【形状・構造及び原理等】

本材は、ニッケルチタン合金製の歯列矯正用コイルスプリングである。

- 1) スプリング部：ニッケルチタン合金  
クローズドコイルスプリング保持部：ステンレス鋼
- 2) 構造
  - ①オープンコイルスプリング



- ②クローズドコイルスプリング

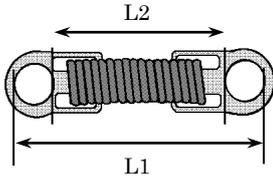

### 【使用目的又は効果】

歯科の歯列矯正治療に用いる。

### 【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 通法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定する。
- 2) 本材を治療計画に合わせて選択する。
- 3) 通法により結紮を行う。
  - ①オープンコイルスプリング  
スプリングを圧縮して使用する。隣り合うコイルが密着するまで圧縮して使用できる。
  - ②クローズドコイルスプリング  
スプリングを引張り伸ばして使用する。スプリングの2倍（L1=9mm、12mm のものはそれぞれ伸びが9mm、12mm、L2=6mm、15mm のものはそれぞれ伸びが6mm、15mm）の長さまで伸ばして使用することが出来る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

クローズドコイルスプリングについては、スプリングの2倍（L1=9mm、12mm のものはそれぞれ伸びが9mm、12mm、L2=6mm、15mm はそれぞれ伸びが6mm、15mm）を超える長さで使用してはならないこと。

### \*【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
  - 2) 本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- \* 3) 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。〔自己認証による〕

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて、保管すること。
- ・本材は、従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
（お客様サポート窓口）075-778-5482

\*電話番号

製造業者 Ultimate Wireforms, Inc.  
アルティメート ワイヤフォームズ  
国名 アメリカ