

## ワイヤープロダクト

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 1) 本材はニッケルを含有しています。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又は類似成分の合金に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 3) 本材は再使用しないこと。


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 構造


本材は、ステンレス鋼線の矯正用線であり、アーチワイヤーとブラケットやチューブを結紮するためのワイヤーである。

合金組成：JIS G 4314 [ばね用ステンレス鋼線材 SUS 304 相当]  
(クロム、ニッケル、マンガン、鉄、その他含有)

- ①リガチャーワイヤー：先端の形状が尖ったもの

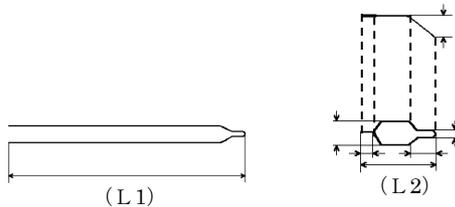

- ②コバヤシフック：ループ状に加工したフックを先端に形成したもの

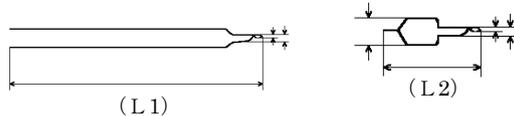

#### 2) 形状

##### ①プリフォーム

直径 (φ) は 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.36mm  
(リガチャーワイヤー)  
0.25, 0.30, 0.36mm  
(コバヤシフック)

長さ (L1) は 152mm (共通)

##### ②ツイスト

直径 (φ) は 0.25mm (リガチャーワイヤー)  
0.30, 0.36mm (コバヤシフック)  
長さ (L2) は 12mm (リガチャーワイヤー)  
20mm (コバヤシフック)

### 【使用目的又は効果】

歯列矯正治療に用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 1) 通法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定する。
- 2) 治療計画やスロットに合わせて選択したアーチワイヤーを、ブラケットやチューブのスロットに嵌め込む。
- 3) 本材をリガチャータイニングプライヤーやニードルホルダーを使用して、アーチワイヤーとブラケットやチューブの結紮を行う。

### \*【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- \* 2) 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。〔自己認証による〕

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
\*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482

製造業者 Ultimate Wireforms, Inc.  
アルティメート ワイヤフォームズ  
国名 アメリカ