

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000

G I シリンジ用ノズル&プラグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本器は、構成品のノズル及びプラグからなる。形状構造は、下図のとおりである。



【原材料】

ノズル：ポリプロピレン

プラグ：エチレン酢酸ビニル共重合体

【使用目的又は効果】

口腔内で充填材又は修復材を適用するために用いる歯科用器具である。

** 【使用方法等】

【使用方法】

- 1) グラスアイオノマーセメントを練板紙等で練和します。
- 2) 練和後、速やかにノズルにセメントを充填し、プラグを挿入してG I シリンジにセットします。
- 3) G I シリンジによりセメントを押し出し、窩洞に充填します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1回の使用毎に1セットを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本器は、直射日光及び湿気を避けて、室温で保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	栃木精工株式会社
住所	〒328-0012 栃木県栃木市平柳町2丁目1番5号
電話番号	0282-27-1133
販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11
電話番号	075-561-1112