


機械器具65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000
ユニロイシリンジ

【形状・構造及び原理等】

本器具は、次の原材料で構成される。

- 1) カラー：ポリサルホン樹脂
- 2) フック：ポリサルホン樹脂
- 3) ピストンCS：真鍮+クロームめっき・ポリサルホン樹脂
- 4) ピストン先金具：真鍮+クロームめっき
- 5) 中金具：真鍮+クロームめっき
- 6) スプリング：ステンレス線
- 7) 胴金具：真鍮+クロームめっき
- 8) 針部：ニードル ステンレス
針基 真鍮+クロームめっき
- 9) プラスチック部：ウルテム樹脂 *
- 10) 清掃針：ステンレス線

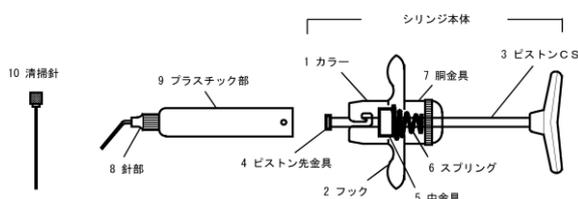

【使用目的又は効果】

本器具は、カートリッジタイプの寒天印象材を口腔内に注入するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 清掃針を針から引き抜きます。
- 2) プラスチック部に溶解保存された寒天カートリッジを挿入します。
- 3) プラスチック部を本体にねじるように装着します。
- 4) 手に寒天印象材を押し出し、寒天印象材の溶解具合などを確認してからピストンを押しして寒天を適用します。
- 5) 口腔内で使用後、再使用する際には速やかに洗浄液・消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。
滅菌方法：オートクレーブ（121°C30分）による滅菌を行います。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 針部を外す時は、必ず針基を持って回すこと。ニードル部分に無理な力がかかると破損につながります。
- 2) 使用前にプラスチック部及びカラーに亀裂などが無いか確認をし、亀裂が発見された場合は使用をとりやめること。
- 3) 器具の落下等、取り扱いの不注意は破損の原因になるので特に取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本器具は、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
- 2) 本器具は、化学薬品の保管場所やそのガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) 本器具は、歯科医療の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

1) 保守・点検

- ①ニードル部分の寒天の詰まりを清掃すること。
- ②使用前にヘッド部のネジ磨耗、針部の損傷、亀裂などの有無を確認し、発見された場合は使用をとりやめること。
- ③使用後は各部を分離し洗浄、清掃、消毒した後、充分に乾燥して、保管すること。針部は、乾燥後、清掃針を挿入した状態で保管すること。

2) 洗浄・消毒等

- ①使用後は、速やかに精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、職業感染防止の為に洗浄・消毒すること。その際、確実に血液や体液、組織片等が除去できたか、ジョイント部や複雑な個所の目視をし、残留異物の付着が無い事を確認すること。
- ②薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書又は取り扱い説明書に従って使用上の注意を遵守すること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ③洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ④本器具は樹脂製のため、オートクレーブ滅菌は製品の劣化を早めます。
- ⑤洗浄液・消毒剤・滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。また、洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者	株式会社 クラーク
及び製造業者	
住所	〒340-0832 埼玉県八潮市柳の宮屋敷通 223 番地 2
電話番号	048-994-1825
販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112