

オーソラインアーチワイヤー T i - N i S E 2 0 0

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 本材はニッケルを含有しています。ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材は再使用しないこと。

**【使用上の注意】


[重要な基本的注意]

- 1) 本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ** 2) 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。[自己認証による]

*【形状・構造及び原理等】

1) 構造

本材は、ニッケル-チタン合金製の歯列矯正用アーチワイヤーで、27℃までに十分オーステナイトに変態するワイヤーである。

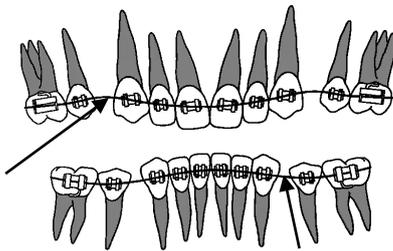

2) 形状：

①ラウンドタイプ：円形断面（上顎10種、下顎10種）

	ワイヤーの形状	センターマーク 2種	断面の直径φ 5種 (mm)
上顎 又は 下顎	Sアーチ	D (ディンプル) 又は E (エッチング)	0.30
			0.36
			0.41
			0.46
			0.51

*②レクタングュラタイプ：長方形断面

(上顎18種、下顎18種)

	ワイヤーの形状	センターマーク 2種	断面の寸法 9種 (mm)
上顎 又は 下顎	Sアーチ	D (ディンプル) 又は E (エッチング)	0.41×0.41
			0.41×0.56
			0.43×0.64
			0.46×0.46
			0.46×0.64
			0.48×0.64
			0.51×0.51
			0.53×0.64
			0.56×0.71

【使用目的又は効果】

歯列矯正治療に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 通法により患者の歯面にブラケットやチューブを固定します。
- 2) 本材を治療計画やブラケットのスロットに合わせて選択します。
- 3) 本材を冷却し、軟化状態にしてブラケットのスロットに嵌め込みます。
- 4) 通法により結紮を行います。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、水濡れ、多湿を避けて、保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福稲上高松町11

**電話番号

(お客様サポート窓口) 075-778-5482

製造業者

Ultimate Wireforms, Inc.

国名

アルティメート ワイヤフォームズ
アメリカ