

松風シリコーンボンド

【禁忌・禁止】

本材又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔成分〕

性状	成分
液	ジビニルポリジメチルシロキサン、ポリジメチルシロキサン、触媒、着色材、トルエン、キシレン、その他

〔原理〕

シリコーン印象材と個人トレーを付加反応により硬化させて接着する。

【使用目的又は効果】

印象採得時にシリコーン印象材と個人トレーの接着に用いる。

* 【使用方法等】

〔本材と併用する材料〕

- * 1) 歯科用シリコーン印象材
「ジルデフィット ウォッシュタイプ」、
「ジルデフィット ウォッシュXSタイプ」、
「ジルデフィット レギュラー&デンチャータイプ」、
「ジルデフィット パテタイプ」
- 2) 歯科印象トレー用レジン
「松風トレーレジン」、「松風トレーレジンII」

〔使用方法〕

- 1) 個人トレーの内面に薄く均一に塗布し、約5～10分間放置するか、室温で十分にエア乾燥します。
- 2) 練和したシリコーン印象材を個人トレーに盛り、印象採得を行います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 下記の材料は接着の妨げになることがあるので、接触又は混入を避けること。
 - ①縮合型シリコーン印象材
 - ②ポリサルファイド（チオコールラバー）系印象材
 - ③ユージノール系材料
 - ④未硬化のコンポジットレジン
 - ⑤未硬化のアクリル系レジン
- 2) ラテックス製の手袋と接触させないこと。
- 3) 必ず口腔外で放置乾燥すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 4) 可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。また、適切な換気（1時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光、火気を避けて、常温（15～25℃）で保管すること。
- ・開封後は密封して保管すること。
- ・本材の使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。
- ・本材は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材の使用期限は包装、容器に記載のとおり。

〔当社データによる〕

※〔例〕 ☒ YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す）

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
*電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482