

歯科材料2 歯冠材料
管理医療機器 陶歯 38644000
ベラシア SA ポーセレン

***【形状・構造及び原理等】**

本品は、珐瑯部および象牙部の2層構造よりなる人工歯（陶歯）であり、前歯と臼歯からなる。

[成分]

層の名前	成分
珐瑯部	長石、けい石、その他
象牙部	長石、けい石、その他

[色調、形態及び大きさ]

*** 1) 前歯（アンテリア）**

方尖型（ST）、方型（S）、卵円型（O）、咬耗型（MA）の4つの基本形態からなり、義歯床用アクリル系レジンに保持するためのピンが1～2本取り付けられている。

色調はA2、A3、A3.5の3色である。

色調	形態	上下顎	大きさ	左右	部位
A2 A3 A3.5	ST（方尖型）	上顎	4	左側 右側	中切歯 側切歯 犬歯
	S（方型）		5		
	O（卵円型）		6		
	MA（咬耗型）	下顎	7（MAのみ）		
3色	4形態	2種類	4種類	2種類	3部位

2) 臼歯（ポステリア）

上顎、下顎別に左右の第一小白歯、第二小白歯、第一大臼歯、第二大臼歯から構成される。

歯冠長径がM（中種）で、片側4歯の全幅径の寸法が、大きさ別に28、30、32の3種類がある。

色調はA2、A3、A3.5の3色である。

色調	形態	上下顎	大きさ	左右	部位
A2 A3 A3.5	M （中種）	上顎	28	左側	第一小白歯
		下顎	30	右側	第二小白歯
			32		第一大臼歯 第二大臼歯
3色	1形態	2種類	3種類	2種類	4部位

[原理]

*本材を義歯床に排列・結合し、総義歯、局部義歯の製作に用いる。

[仕様]

該当規格：JIS T 6511：2005 [義歯床用陶歯]

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

***【使用方法等】**

[本材と併用する材料]

義歯床用アクリル系レジン

[使用方法]

本材を使用して、通法により義歯の製作を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

*形態修正や咬合の調整を行ったときは、入念な研磨を行うこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本材の研削、研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、保護眼鏡、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、作業により発生する粉塵を防御すること。

[その他の注意]

患者が義歯を使用する上での一般的な注意として、以下を指導してください。

・義歯を清潔に保つこと。食後、軟かい義歯用歯ブラシを使用し、食物残渣などを軽く取り、清掃すること。また、義歯洗浄剤などを併用すればより効果的である。

***【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

・本材は、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
・本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は包装に記載の使用期限※までに使用すること。

[当社データによる]

※(例)  YYYY - MM - DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112

モールドチャート等をご参照ください。