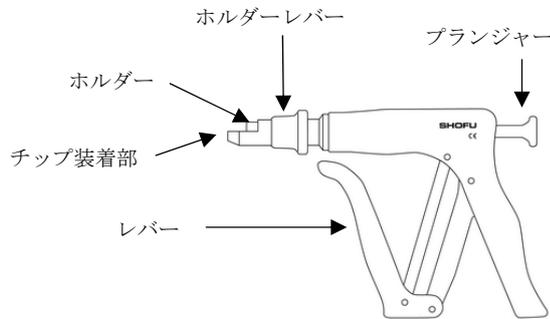


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000
ビューティフィルチップ ディispenser

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【材質】

真鍮クロムメッキ、ポリサルフォン、ポリエーテルエーテルケトン、ステンレス鋼

【原理】

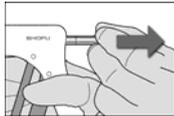
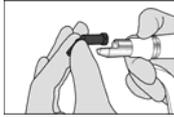
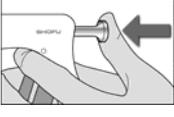
レバーを操作することでチップ装着部に装着されたチップからペーストが押し出される。

【使用目的又は効果】

チップに充填された歯科材料の採取や口腔内への直接充填に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 口腔内にペーストを直接充填する場合は、使用前に本器をオートクレーブで滅菌します。
(滅菌条件(推奨):オートクレーブで132°C10分、又は121°C30分)
- 2) プランジャーを後方一杯まで引きます。
- 3) ホルダーレバーを後方に引きます。
- 4) チップ装着部にチップを装着します。
- 5) ホルダーレバーを元に戻してチップを固定します。
- 6) チップがホルダーに嵌合し、チップ装着部に正しく装着されていることを確認した後、プランジャーを押し込みます。
- 7) レバーを握り、チップ内のペーストを押し出します。
- 8) 使用後は、プランジャーを後方一杯まで引き、ホルダーレバーを後方に引いてチップを取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本器に適さないチップは使用しないこと。
- 2) ペーストを急激に押し出すとチップが破損してペーストが漏れたり、飛散したりする恐れがあるので、ペーストはゆっくりと押し出すこと。
- 3) ペーストの押し出しに違和感がある場合は、本器に異常がないか確認すること。本器に異常が認められる場合は直ちに使用を中止すること。本器に異常が認められない場合は、チップに問題がある可能性があるため、新しいチップに交換すること。
- 4) 本器にペーストが付着した場合は、速やかに除去し、清掃を行うこと。
- 5) ホルダーレバーやレバーの操作時に手指を挟まないよう注意すること。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1) 本器を使用する際に、損傷、割れ、ひび、曲がり等が認められる場合は使用しないこと。
- 2) オートクレーブによる滅菌時、本器の樹脂部は134°Cを超えると変形する恐れがあるため、滅菌器内の温度が134°Cを超える機種は使用しないこと。
- 3) オートクレーブによる滅菌後は、本器（とくに金属部）が熱くなっているため、本器を十分に冷却してから使用すること。
- 4) 本器はケミクレーブによる滅菌を行わないこと。
- 5) 使用後は速やかに付着物を除去し、消毒又は滅菌すること。
- 6) 本器の金属部を腐食する恐れがあるため、本器を酸性の強い薬剤に長時間浸漬しないこと。また、塩素系等の金属腐食性の高い薬剤で清掃・消毒を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本器は、金属部分が錆びる恐れがあるため、水分が付着した状態で保管しないこと。また、湿度が高い場所を避けて保管すること。
- ・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112