

機械器具 5 8 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000
レベリング クリアアタッチメント


再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

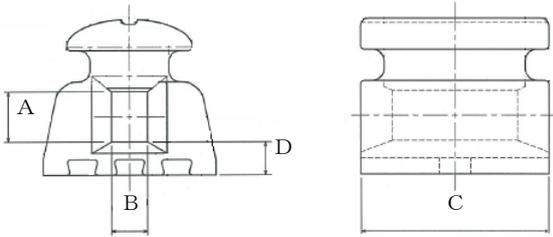

部位		寸法 (mm)
A	スロット深さ	0.64
B	スロット高さ	0.46
C	スロット長さ	2.40
D	イン・アウト	0.43

[材質]

ポリカーボネート/ポリブチレンテレフタレート

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 使用する接着材の添付文書等に従い、歯面に接着します。
- 2) 接着材が十分に硬化した後、ワイヤー等を装着します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ボンディングベースが油分などで汚れていると適切な接着力が得られないため、予め清掃してから接着すること。
- 2) 過度の矯正力を付与しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本品の樹脂成分であるポリカーボネートは唾液などの影響により、内分泌かく乱作用を有すると疑われているビスフェノールA (BPA) が微量に溶出するおそれがあります。なお、厚生労働省の「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会の報告」などによると、ポリカーボネートから溶出するレベルのBPAが人の健康に重大な影響を与えると科学的知見は得られていません。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温、多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11

* 電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482