

【形状・構造及び原理等】

[形状・種類]

- 1) 形状：螺旋状
2) 種類

サイズ	先端部での作業部の 突出部の径（mm）	色別
025	0.25	赤
030	0.30	青
035	0.35	緑
040	0.40	黒

操作部の長さ(mm)：21、25

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
＊ 電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482
＊ 製造業者 Maillefer Instruments Holding Sa`rl
メルファーインスツルメント社
＊ 国名 スイス

[原材料]

操作部：ステンレス鋼
軸 部：真鍮・ニッケルめっき（軸部形式 1：CA 用）

[原理]

能動型医療機器に接続して、螺旋状の線を回転運動させて根管
充填材（糊材等）を根管に充填する。

【使用目的又は効果】

根管内に根管充填材（糊材等）を送り込んで充填するために使用
する。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 本器を滅菌します。
2) 充填する根管の大きさにあったサイズを選び、減速コントラ
ーシングに取り付け、根管充填材を送り込んで使用します。
3) 右回転で使用します。
最高許容回転速度：600min⁻¹
4) 再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を
除去し、流水でこれら薬液を完全に洗い流してから、滅菌を行
います。

滅菌方法：オートクレーブ（134℃ 3 分、又は 121℃ 30 分）による
滅菌を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 使用する前に、形状や寸法に違いがないか確認すること。
2) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認すること。
3) 汚れたり、曲がったり、変形したものは使用しないこと。
4) 無理な角度、過度の加圧での使用をしないこと。
5) えぐるような力を加えないこと。
6) 滅菌については、ケミクレーブ又は各種薬液によっても可能で
あるが、各機械メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従っ
て行うこと。
7) 清掃液、消毒剤については、各メーカーの指示に従って使用す
ること。
8) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 最高許容回転速度を越えて使用しないこと。
2) クロロフォルム、フェノール又はフェノール系の物質を含
んだ薬液及び次亜塩素酸ナトリウム溶液の使用は避けるこ
と。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本器は、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外
圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管
理すること。