

ユーロポスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- 本品の材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

<使用方法>

- 本品の材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- ユーロポストは、再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】**

【形状・構造】

- ① ユーロポスト(再使用禁止) ② 専用リーマー(ショート)



【サイズ・種類】

本品には、以下の種類がある。(単位: mm)

種類名	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	
ポストの径	0.9	1.1	1.3	1.5	1.65	
ポストの長さ	S	6.4	7.0	8.0	9.0	11.0
	M	8.4	9.0	10.0	11.0	13.0
	L	10.4	11.0	12.0	13.0	15.0

専用リーマー(全長 28mm)には、ポストの径に対応した 5 種類があり、ハンドル部のラインの本数によって識別することができる(0.9 用: 0 本 ~ 1.7 用: ライン 4 本)。

【体に接触する部分の主な組成】

ユーロポスト: ステンレス鋼(成分表以下のとおり)

成分	%
ニッケル	9
クロム	18
鉄	70
その他	3

専用リーマー: ステンレス鋼
シリコンストップ: シリコン樹脂

【原理】

リーマーで形成した根管内にセメント等を充填し、ユーロポストを挿入し、支台を築造する。

【付属品】

- ボックスドライバー
- シリコンストップ
- ポスト長ガイドフィルム

【使用目的又は効果】

支台築造に用いる。

【使用方法等】**/*

【使用方法】

- (1) ポスト長ガイドフィルムを X 線写真に対照させ、適切なサイズのユーロポスト(以下「ポスト」という。)を選択する。
- (2) ポストの径に対応する専用リーマー(以下「リーマー」という。)を選択する。
- (3) リーマーにシリコンストップを付け、ルーラーを使ってリーミングする深さに調整する。(図 1)

- (4) 一方方向に根管拡大し、十分な根管壁の厚みを確保する。(図 2)
- (5) レンツロ等を用いて、少量のセメント又はコア用レジン
を根管内に充填し、ポストのネジ山にも少量のセメント
又はコア用レジンを盛りつける。(図 3)
- (6) ポストはボックスドライバーを使って根管内へ移送する。

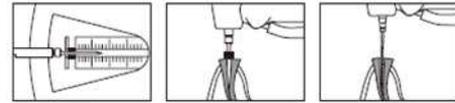


図 1 図 2 図 3

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 付属のリーマー以外は使用しないこと。
- (2) リーマーは、2,000~5,000rpm の回転速度で使用すること。
- (3) ポストを根管内へ挿入する際は、落下・誤飲を防ぐためにドライバーの穴に糸を通すこと。
- (4) ポストをドライバーでねじ込まないこと。[ドライバー先端の曲がりの原因となる]
- (5) 根管内へのポストの装着は、セメント又はコア用レジンを使用すること。
- (6) リーマーの使用回数は、20~40 回が目安である。(40 回まで使用可能ということではない。) 使用状況により、数回で使用限界に達したと思われる場合は、廃棄すること。
- (7) ユーロポストは、再滅菌しないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) リーマーに、損傷、変形(キズ、屈曲)、劣化などがみられた場合は、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。[作業部が破折し、根管内に破折片が残る可能性があるため]
- (2) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者及び医療従事者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- (3) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】(ユーロポスト、専用リーマー)

- (1) 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌又は乾熱滅菌を行うこと。
(シリコンストップも同様に滅菌可)
高圧蒸気滅菌の場合:
推奨滅菌条件(日本薬局方による): 115~118°C 30 分間
121~124°C 15 分間
126~129°C 10 分間
乾熱滅菌の場合:
推奨滅菌条件(日本薬局方による): 160-170°C 120 分間
170-180°C 60 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社モリタ

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: アントジール Anthogyr SAS

国名: フランス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com