

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具  
一般医療機器 歯科用顎関節音測定器 70702000

特定保守管理医療機器 エレクトロソノグラム ESG-2

【形状・構造及び原理等】\*\*

【形状・寸法】



寸法 幅 50 mm×奥行 100mm×高さ 25mm

【原理】

皮膚面上にマイクロホンを設置して咬合音や関節音を採取し、本品内の PC ボードで増幅し、コンピュータモニター上で解析する。

【付属品】

ヘッドホーン

【お問い合わせ先 (医療機器サイバーセキュリティ関連含む)】

問 合 せ 窓 口 : 株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号 : 0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号 : 0800-222-6480 (無料)

E - m a i l : e-customer@morita.com

【使用目的又は効果】

左右の顎関節部から生じる音を周波数分析して表示することにより、下顎運動時の顎関節音を測定し、客観的評価や顎関節内部 (関節円板) の動的評価の診断に使用し、異常を検出するのに用いる。

【使用方法等】\*

【使用方法】

- (1) 本品の DIN コネクターを「K 7 エバリュエーションシステム E X」本体前面に接続する。
- (2) 「K 7 エバリュエーションシステム E X」のプログラムを開始する。
- (3) 本品のヘッドホーンを患者の頭に図のようにセットし、左右のマイクロホンの隔膜が、対応する顎関節の真中になるように調節する。
- (4) 顎関節音、咬合音を測定する。



【組み合わせて使用する医療機器】

- (1) 本品は、「販売名: K 7 エバリュエーションシステム E X (承認番号: 21700BZY00195000)」と併用して使用する。

【保守・点検に係る事項】

【清掃】

- (1) アルコールを用いて清拭すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*/\*

製造販売業者: 株式会社モリタ

電 話 番 号 : 06-6380-2525

外国製造業者: マイオトロニクス・ノロメド

Myotronics-Noromed, Inc.

国 名 : アメリカ合衆国

「K 7 エバリュエーションシステム E X」の取扱説明書を必ずご参照ください。