

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)

MT ディスポチップ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：

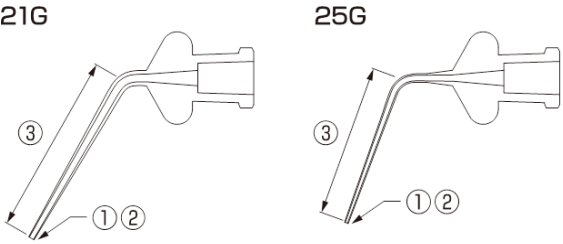

(単位：約 mm)

種類	①先端外径	②先端内径	③先端長さ
21G	0.8	0.6	24
25G	0.5	0.3	20

主な原材料：

PP (ランダムコポリマー) 又は PP-PE 共重合体

【使用目的又は効果】

[使用目的]

口腔内で充填材又は修復材を適用する際に用いる機器。

[効果]

シリンジ先端に装着し、修復部位へ材料を充填することができる。

【使用方法等】

[使用方法]

- (1) ルアーロック式のシリンジ先端に時計方向に回しながら装着します。
- (2) シリンジのプランジャー部を軽く押して、材料がスムーズに排出できることを確認します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- (1) 本品装着後、ゆるみがないことを確認し使用すること。
- (2) チップを装着する際は、シリンジの本体部をもって装着すること。シリンジのプランジャー部を持つと内容物が飛び出すことがあるので注意すること。
- (3) 本品は 1 患者に 1 個の使用とし、他の患者への使いまわしはしないこと。

【使用上の注意】

[使用注意]

- (1) 本品を【使用目的又は効果】に記載された用途以外で使用しないこと。
- (2) 本品と併用する医療機器は添付文書を確認後、その指示に従い使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は乾燥した場所で、直射日光を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

YAMAKIN 株式会社

住所：〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷 1090-3

テクニカルサポート：☎0120-39-4929

ホームページアドレス：<https://www.yamakin-gold.co.jp>