

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム 11155010

ラバーダムシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 本品に使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

＜使用方法＞

- 本品に使用されている材質（天然ゴム）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】*

〔形状・構造〕

本品は、口腔内の簡易防湿に用いる正方形のラテックスゴム製シートである。

〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

サイズ	厚さ	色 調
5×5 インチ (約 127×127mm)	シン（薄）	グリーン、ライト
	ミディアム（中）	グリーン、ライト、ブルー
6×6 インチ (約 152×152mm)	シン（薄）	グリーン、ライト
	ミディアム（中）	グリーン、ライト、ブルー
	ヘビー（厚）	グリーン、ライト

〔体に接触する部分の主な組成〕

天然ゴムラテックス

〔原理〕

本品をパンチで穴をあけ、歯牙に被せる。専用の装置を被せることにより、歯牙を孤立させ唾液水分の流入を排除する。

【使用目的又は効果】

歯科治療中の口腔内における手術野の隔離に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- (1) ラバーダムパンチで本品に穴をあけ、歯牙に被せる。
- (2) 露出させた歯の歯頸部にラバーダムクランプ等を装着することにより本品を押さえつけ、手術野を隔離する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- (1) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあるため、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な措置を施すこと。
- (2) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】**

〔保管の条件〕

- (1) 本品は、遮光した容器に入れて、室温で保管すること。

〔有効期間〕

製造月より 4 年 [自己認証（外国製造業者データ）による。]
容器又は表示ラベルに記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号：06-6380-2525

外国製造業者：イサクソン Isakssons Gummifabrik AB

国 名：スウェーデン

〔お問い合わせ先〕

問 合 せ 窓 口：株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号：0800-222-8020（無料）

F a x 番 号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l：e-customer@morita.com