

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000

オゾンインプレッショントレー

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- 本品の材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

<使用方法>

- 本品の材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、印象材を盛るトレー部及びその支台となる把持部からなる、穴あきタイプの印象採得用トレーである。

【サイズ・種類】**

形状・種類		サイズ	使用部位
有歯顎用 トレー		U-L 大	上顎用
		U-M 中	
		U-S 小	
		L-L 大	下顎用
		L-M 中	
		L-S 小	
無歯顎用 トレー		U-L 大	上顎用
		U-S 小	
局部用 トレー		PA —	上顎前歯部用
		PB —	下顎前歯部用
		P1 —	臼歯部用
		P2 —	
		P3 —	
		P4 —	
小児用 トレー		U-OL 大	上顎用
		U-OM 中	
		U-OS 小	
		L-OL 大	下顎用
		L-OM 中	
		L-OS 小	

【体に接触する部分の主な組成】

黄銅合金地金、ニッケルメッキ

【原理】

本品に印象材を盛り、歯に圧接することにより歯型を採取する。より正確な印象採得のため、トレー部に小さな穴が付与されている。

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するのに用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) トレー部に印象材を盛る。
- (2) 印象対象の歯列部分に圧接し、印象採得する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者及び医療従事者は使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

【保守・点検に係る事項】*

【洗浄】

- (1) トレーに付着した印象材は、軟毛ブラシ等により除去すること。
- (2) ワイヤブラシ、クレンザー等で擦って洗浄しないこと。[メッキが剥がれる原因となる。]
- (3) 中性のトレークリーナーを使用すること。
- (4) 材質の異なる金属製器具と一緒に浸漬・洗浄しないこと。[変質、変色するおそれがある。]
- (5) 流水下ですすぎを十分に行うこと。[トレークリーナー等が残っていると、滅菌時に変質、変色するおそれがある。]

【消毒】

- (1) 酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等は使用しないこと。[メッキの剥がれ、変質、変色するおそれがある。]

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件(日本薬局方による): 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 乾燥工程は行わないこと。
- (3) 166℃以上に加熱しないこと。
- (4) 乾熱滅菌は行わないこと。[変質・変色するおそれがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者: 株式会社モリタ

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: オゾン Osung MND CO., LTD.

国名: 大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com